


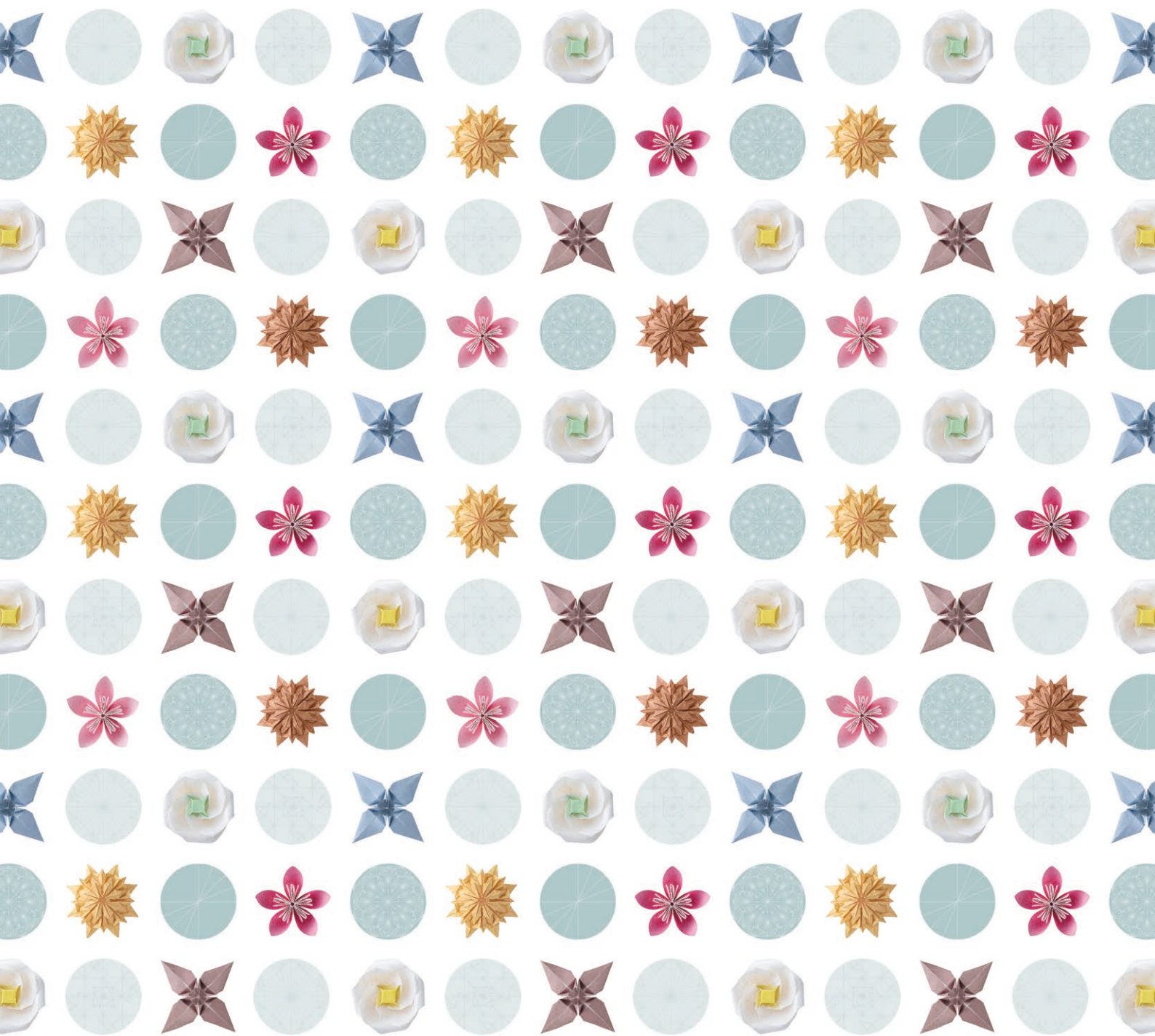

Kontaktlinsen und Pflegemittel Produktkatalog

Hinweis: Mit einem Klick auf das verlinkte Inhaltsverzeichnis gelangen Sie direkt zur gewünschten Seite.

Allgemeine Information	4
Ihr Partner für alle Kontaktlinsen	4
Wir sind für Sie da	5
MELS + FLEXLENS	6
Fortbildung	7
Anpassprogramm easyfit	8
Austauschlinsen	12
	
Tageslinsen	
Miru Tageslinsen	13
Smart Touch™	14
Miru 1day UpSide Silikon-Hydrogel Tageslinsen	15
Miru 1day Flat Pack Hydrogel Tageslinsen	18
14-Tageslinsen	
Menisoft S	21
Monatslinsen	
Miru 1month Silikon-Hydrogel Monatslinsen	24
Menisoft Hydrogel Monatslinsen	28
Formstabile Linsen	30
	
Menicon Comfort Design	31
Formstabile Linsen	32
Sphärisch / Asphärisch	
Comfort / Comfort Symbio	34
Omni / Omni Symbio	36
Z	37
E	38
Z Alpha	39
EX	40
Torisch	
Comfort BTC/BT/ Comfort Symbio BTC/BT	42
Omni BTC/BT /Omni Symbio BTC/BT	44
Omni FT	46
Multifokal simultan	
Comfort Progressive / Comfort Progressive BTC/BT	48
Comfort Progressive+	50
Comfort Progressive Inverse	51
Omni Progressive / Omni Progressive BTC/BT	52
Omni Progressive+ / Omni Progressive+ BTC/BT	54
Omni Progressive Inverse	56
Multifokal alternierend	
Menifocal Z	57
Omni Executive	58

Orthokeratologie	
Z Night	60
Z Night Toric	60
Kontrolle der Topographie in easyfit: Bulls eye	61
Keratokonius	
Fünf unterschiedliche Designs	62
Rose K2 KC™	63
Rose K2 PG™	64
Rose K2 IC™	65
Rose K2 NC™	66
Rose K2 XL™	67
Trial Sets / MeniLAB 0,5%	68
Z Alpha E-1 / EX E-1	69

Individuell soft 72



3-Monatslinsen (Silikon-Hydrogel)	
Indivisual	73
6-Monatslinsen (Hydrogel)	
Indivisual72	76
Jahreslinsen (Hydrogel)	
Soft 72	79


Pflegemittel und Zubehör 82



Für weiche Kontaktlinsen	
BIOcare	83
SOLOCARE AQUA®	84
MeniCare Soft	85
OXIcare	86
Für formstabile Kontaktlinsen	
Das Menicon Pfllegeteam	87
MENICARE PURE	88
PROGENT	89
SPRAY & CLEAN	90
MeniCare Plus	91
SP CARE	92
MeniLAB 0,5%	93
Zubehör	
Zubehör	94
BLUpan® Augentropfen	95

Ihr Partner für alle Kontaktlinsen

2018 feierte Menicon sein 30-jähriges Bestehen auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen hat sich seit 1988 kontinuierlich weiterentwickelt, und wir sind stolz, Ihnen heute ein **breitgefächertes Produkt- und Serviceportfolio** anbieten zu können:

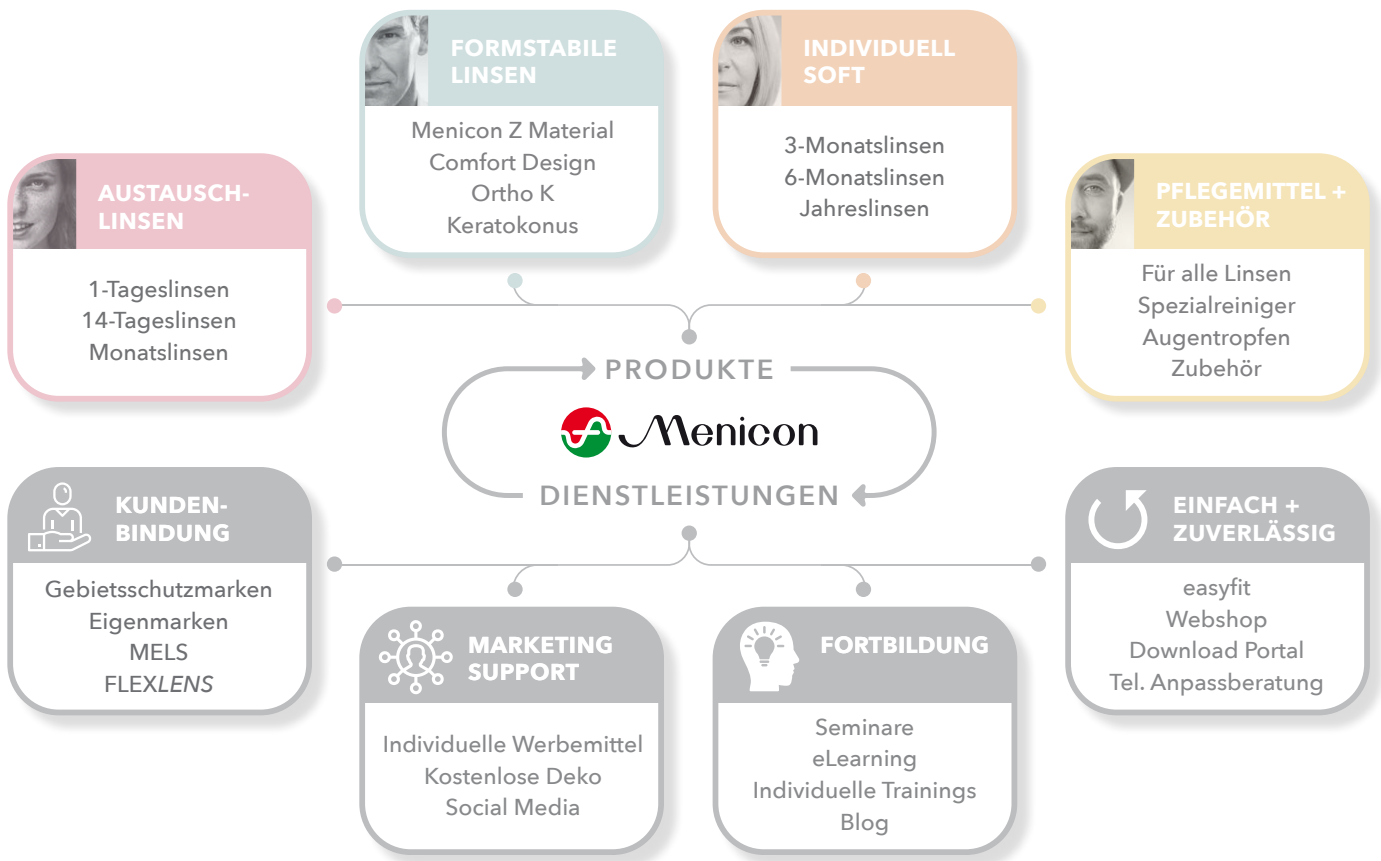

Menicon möchte Ihr Partner sein in allen Fragen rund um die Kontaktlinse. **Unsere Philosophie** liegt darin, Ihnen einfach und effizient schnelle Anpasserfolge zu ermöglichen. Wir bieten Ihnen hierfür Kontaktlinsen und Pflegemittel mit höchster Funktionalität und Qualität, ergänzt durch das praktische Anpassprogramm **easyfit**.

Wir sind für Sie da:

Mail: kundenservice@menicon.de
Fon: Bestellungen: +49 (0)69 840 008-10
 Anpassberatung: +49 (0)69 840 008-56
Zeiten: Montag bis Donnerstag: 8:30 – 18:00 Uhr
 Freitag: 8:30 – 17:30 Uhr
Adresse: Menicon GmbH
 Heinrich-Krumm-Str. 1-3
 63073 Offenbach



Webshop

Für Ihre Bestellungen, porto- und versandkostenfrei
www.menicon-service.com



Menicon Lernangebot

Informationen und Anmeldungen auf
www.menicon.de/professional/fortbildung



Menicon Blog für Kontaktlinsenanpasser

Interessantes rund um die Kontaktlinse
www.menicon.de/professional/articles/blog

Hier abonnieren:



Menicon E-Mail Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem
 Menicon Newsletter
www.menicon-news.de/newsletter-24-de



Downloads

Marketing Materialien, Packungsabbildungen, Produkt-
 infos, Videos, Social Media Posts, Seminarunterlagen
www.menicon-news.de/downloads



Anpassberatung

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei allen
 Fragen rund um die Anpassung unserer Produkte,
 wir rufen Sie zur vereinbarten Zeit an
www.menicon-news.de/kalenderbuchung-102-de



Linsenrechner

Für eine einfache und schnelle Anpassung
www.toric.meniconcalculator.com





MELS Kontaktlinsen-Abo

Ihr Angebot für Ihre Kunden, die ganz regelmäßig Linsen tragen und Bequemlichkeit schätzen

MELS steht für Mein Einfaches Linsen System – ein fix und fertiges Kontaktlinsen-Abosystem, durch das Sie Ihre Kunden nachhaltig an Ihr Geschäft binden.

Das Konzept:

- Menicon liefert in Ihrem Namen Kontaktlinsen und Pflegemittel pünktlich alle sechs Monate direkt an Ihre Kunden.
- Die Kunden zahlen in kleinen monatlichen Raten per Lastschrift.
- Das System erinnert Ihre Kunden per E-Mail an Nachkontrollen.

Ihre Vorteile:

- Automatische Bestellung:
 - Kein Zusatzaufwand,
 - Keine Fehlbestellungen
 - Weniger Lagerware
- Mehr Zeit für Ihre Kunden



FLEXLENS Flexibler Nachkauf, ganz einfach

Ihr Angebot für Ihre Kunden, die Menicon Austauschlinsen tragen, dabei aber flexibel bleiben möchten

FLEXLENS macht den Nachkauf von Menicon Austauschlinsen und Pflegemitteln in Ihrem Geschäft einfach, schnell und flexibel.

Das Konzept:

- Der im System gemeldete Kunde erhält nach einer definierten Zeit (je nach Art/Menge der gekauften Linsen) automatisch eine SMS mit einem Kauf-Link, über den er mit wenigen Klicks seine Linsen bei Ihnen nachkaufen kann.
- Menicon liefert die bestellten Produkte in Ihrem Namen an Ihren Kunden.

Ihre Vorteile:

- Hohe Nachkaufquote
- Engerer Kontakt zu Ihren Kunden
- Höhere Kundenzufriedenheit
- Bessere Kundenbindung
- Wenig Aufwand



Für mehr Info zu MELS + FLEXLENS
www.menicon.de/professional/fortbildung



Chancen erkennen – Potenziale nutzen

Kontaktlinsen bieten viele Chancen, Ihr Geschäft noch erfolgreicher zu machen. Nutzen Sie unser Fortbildungsangebot, um sich oder Ihre Mitarbeiter fit zu machen für die Kontaktlinsenansprache und/oder die Anpassung.

Unsere Themen und Inhalte spiegeln das Marktpotenzial wider und geben Ihnen das Rüstzeug, sich durch zusätzliche Kompetenz und ein bedarfsgenaues Angebot aus Ihrem Wettbewerbsumfeld hervorzuheben. Unser Seminarprogramm wird ständig überarbeitet und Ihren Bedürfnissen angepasst.

Unser Professional Service Team freut sich auf Sie!



Webinare



Weitere Informationen

eLearning



Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zum
Menicon Fortbildungsangebot
finden Sie auf [www.menicon.de/
professional/fortbildung](http://www.menicon.de/professional/fortbildung)

Hier können Sie sich auch gleich
anmelden.

Anpassprogramm easyfit

Einfache und schnelle Anpassung aller Kontaktlinsen. Sie geben Ihre Messdaten ein. Das Programm schlägt Ihnen ganz schnell und unkompliziert die erste Kontaktlinse vor.



Ihre Vorteile im Überblick

- Datenimport aus 19 verschiedenen Topographen
- Einfache, schnelle Berechnung aller Menicon Kontaktlinsen
- Präzise und zuverlässige Berechnungen
- Animierte Fluobilder
- Online Kommunikation mit der Anpassberatung
- Bestellung aus **easyfit**
- Regelmäßige automatische Updates

Kostenlos für Menicon Kunden

Download unter
[www.menicon.de/
professional](http://www.menicon.de/professional)




Systemvoraussetzungen

- Mindestens Windows XP mit Service Pack 2
- NET Framework (ist als Download hinterlegt, falls nicht auf dem Rechner installiert)



Anpassprogramm easyfit

easyfit

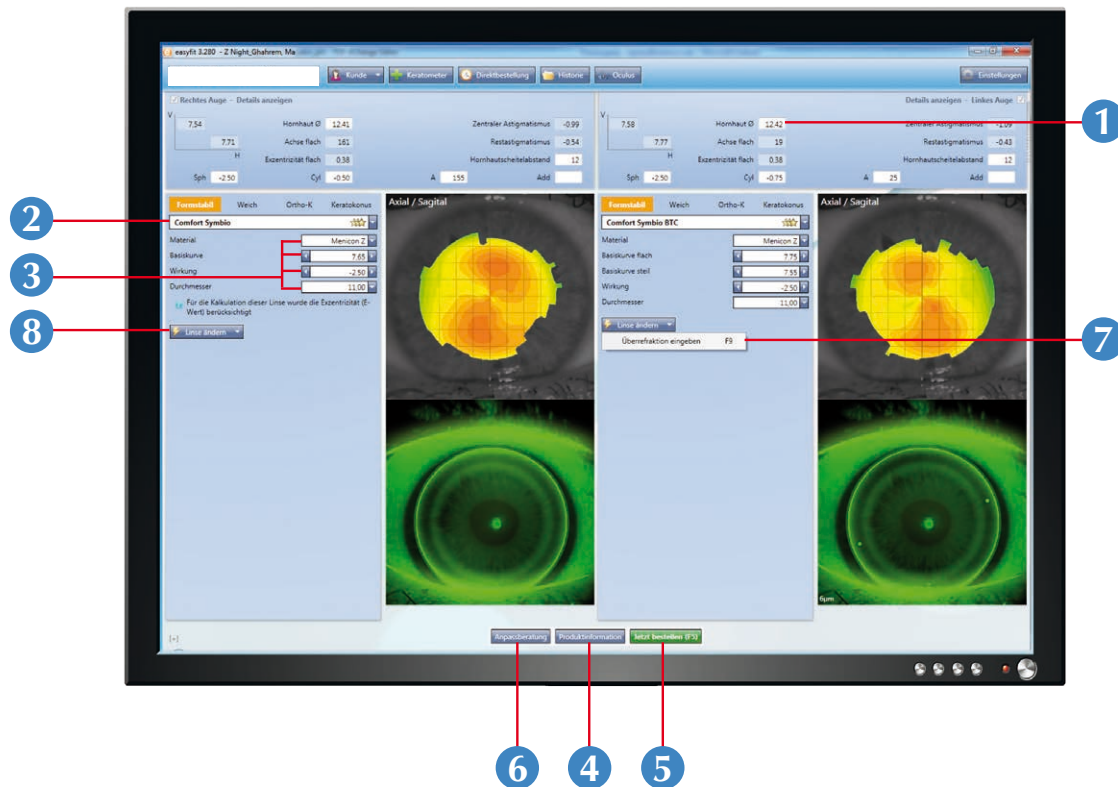

1. Eingabe Hornhaut- und Refraktionsdaten

- Topographendaten-Import über den Topographen-Button
- Manuelle Eingabe über Keratometer-Button
- Detail-Informationen stützen Ihre Anpassung

2. Auswahl des gewünschten Kontaktlinsentyps

3. Automatische Berechnung der bestmöglichen Kontaktlinse

Alle Parameter können manuell geändert werden.

4. Webbasierte Produktinformation

5. Bestellung der gewünschten Kontaktlinsen

Online über **easyfit**, im Menicon My SHOP, telefonisch

6. Online-Kommunikation mit der Anpassberatung

- Übermittlung des **easyfit** Exports
- Zusendung zusätzlicher Daten, z.B. Spaltlampenaufnahmen

7. Eingabe evtl. notwendiger Überrefraktion

Automatische Berechnung einer neuen Kontaktlinse.

8. Änderung der zuletzt bestellten Kontaktlinse

- Notwendige Änderungen werden automatisch berechnet.
- Jede vorgenommene Berechnung wird unter „Historie“ gespeichert.



Austauschlinsen

Tageslinsen

14-Tageslinsen

Monatslinsen

Austauschlinsen

Tageslinsen

Miru 1day UpSide und Miru 1day Flat Pack	
Tageslinsen: Smart Touch™	13
Miru 1day UpSide (Silikon-Hydrogel)	15
- Sphärisch	15
- Torisch	16
- Multifokal	17
Miru 1day Flat Pack (Silikon-Hydrogel)	18
- Sphärisch	18
- Torisch	19
- Multifokal	20

14-Tageslinsen

Menisoft S (Silikon-Hydrogel)	21
- Sphärisch	22
- Torisch.....	23

Monatslinsen

Miru 1month (Silikon-Hydrogel)	24
- Sphärisch	25
- Torisch	26
- Multifokal	27
Menisoft (Hydrogel)	28

Miru 1day UpSide und Miru 1day Flat Pack Tageslinsen




SMART TOUCH™

Einzigartige Verpackung für hygienische Handhabung

Alle Menicon Tageslinsen-Blister werden mit der Smart Touch™ Technologie hergestellt. Dieses innovative Verpackungsdesign stellt sicher, dass die Innenfläche der Linse bei der Handhabung nicht berührt und somit nicht kontaminiert wird. Der Träger berührt nur die Außenfläche der Linse.


Smart Touch™

Die einzigartige „Smart Zone“ im Blister stellt sicher, dass die Innenseite der Linse nach unten zeigt. So kann die Linse entnommen und aufgesetzt werden, ohne die Innenseite zu berühren.

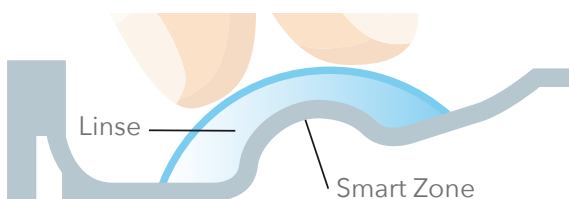

Herkömmlicher Blister

In herkömmlichen Blistern zeigt die Innenfläche der Linse nach oben. Dies erhöht die Möglichkeit einer Kontamination der Innenfläche bei der Handhabung.

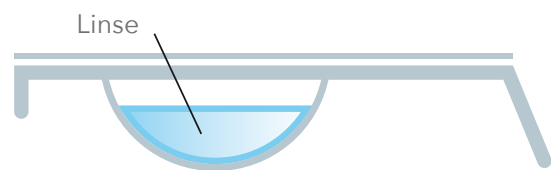

Gesundheit



Sehen



Komfort



Convenience



Hygiene



Umwelt

Handhabung Smart Touch™

Miru 1day UpSide



1

Öffnen

Sie den Blister, indem Sie die Folie ganz abziehen.



2

Greifen


Sie die Linse mit Daumen und Zeigefinger.



3

Positionieren

Sie die Linse auf Ihrem Zeigefinger. Sie liegt richtig herum.

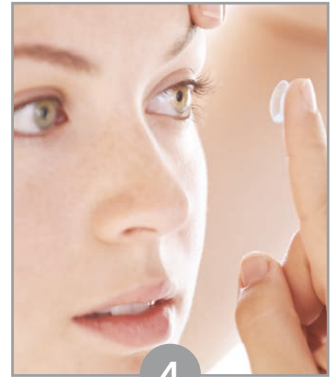

4

Aufsetzen

und komfortables Sehvergnügen genießen.


Miru 1day Flat Pack



Beim Öffnen des Blisters zeigt die Außenseite der Linse stets nach oben



Es ist nicht nötig, die Innenseite der Linse anzufassen

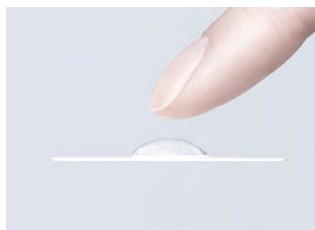

Das Verunreinigungsrisiko für die Innenseite der Linse ist gering



Eine einfache und schnelle Handhabung sorgt für optimale Hygiene

Miru 1day UpSide

Art.-Nr. 1391

Silikon-Hydrogel Tageslinse



Material:

Silikon-Hydrogel (Midafilcon A)

- Dk/t @ -3,00 dpt: 91 (sphärisch und multifokal), 80 (torisch)
- Wassergehalt: 56%
- E-Modul: 0,36
- UV-Schutz Klasse 2
- Handlingstint: blau

Eigenschaften:

Smart Touch™

MeniSilk™ Air

- Silikon-Hydrogel Material der neuesten Generation

NanoGloss™ Pro

- Nanometergenaue Präzision für eine ultraglatte Oberfläche

Vorteile:

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Hygienisch: kein Berühren der Innenfläche
- ▶ Hohe Sauerstoffdurchlässigkeit
- ▶ Sehr niedriger Modulus
- ▶ Ausgewogener Wassergehalt
- ▶ Niedrige Reibung
- ▶ Hervorragende Benetzung
- ▶ Hohe Ablagerungsresistenz

Kombiniert die gesundheitlichen Vorteile eines Silikon-Hydrogels mit dem Komfort eines Hydrogels und erfüllt die Wünsche der Träger nach komfortablem, gesundem Linsentragen und einfacher Handhabung.

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
8,40	+6,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung	14,20
	-6,50 bis -13,00 in 0,50 dpt Abstufung nicht in plan erhältlich	

Miru 1day UpSide toric


Art.-Nr. 1392

Silikon-Hydrogel Tageslinse




Enhanced Visiostable Design™


Das verbesserte Visiostable Design™ berücksichtigt die natürliche Form des Auges um noch stabileres Sehen zu ermöglichen und den Komfort zu verbessern.

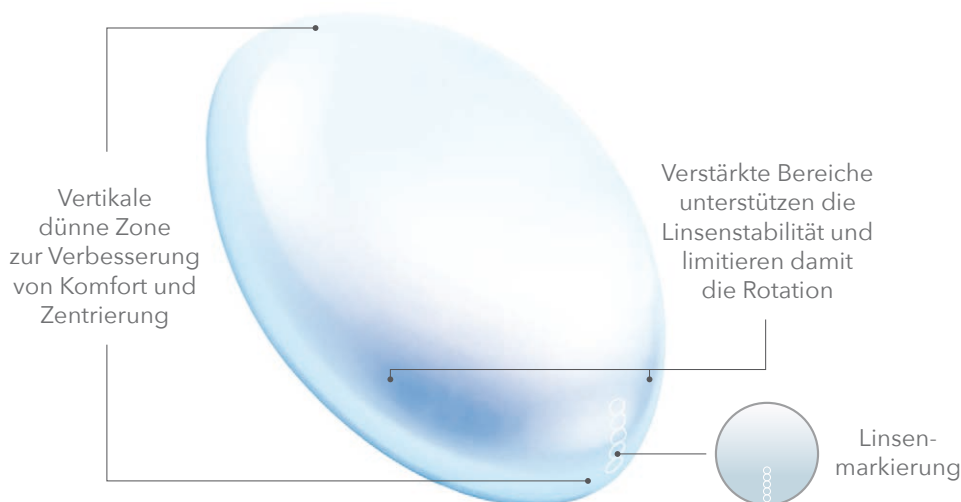

Anatomisches Profil

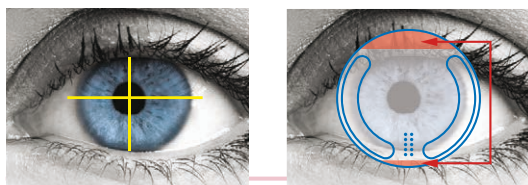

Die einzigartigen asymmetrischen vertikalen dünnen Zonen entsprechen der natürlichen asymmetrischen Bedeckung der Hornhaut und nutzen die natürliche Lidkraft, was die Zentrierung optimiert und die Rotation verhindert.

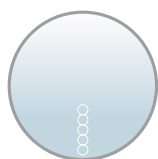

Durch Smart Fit sitzt die Linse automatisch korrekt, egal wie sie aufgesetzt wird.



Für eine einfache und schnelle Anpassung, nutzen Sie den Menicon Linsenrechner: toric.meniconcalculator.com


Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
8,40	plan bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung	14,20
	-6,50 bis -10,00 in 0,50 dpt Abstufung	

Miru 1day UpSide multifocal

Art.-Nr. 1393

Silikon-Hydrogel Tageslinse

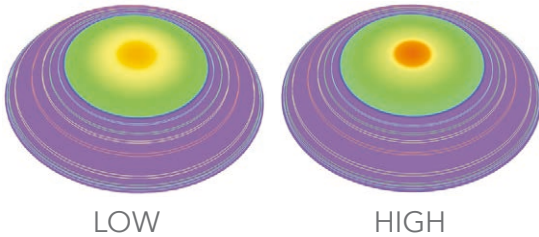

Neuro Adaptive™ Design - Nähe im Zentrum

Leichte Adaption durch natürliche, sanfte Übergänge von der Nähe über den Zwischenbereich bis zur Ferne.

Erfolgreiche Anpassung mit Miru 1day UpSide multifocal

Anpassempfehlung:

- Soviel Plus wie möglich in der Fernrefraktion
- Berücksichtigung des HSA ($> +/ - 4$ dpt) und das BSG (beste sphärische Glas) für Astigmatismen bis zu 1 dpt.
- Bestimmen Sie das dominante Auge
- Wählen Sie entsprechend der gemessenen Addition, die erste Linse aus. Bieten Sie unter realen Bedingungen Plus für die Ferne an.



Für eine einfache und schnelle Anpassung, nutzen Sie den Menicon Linsenrechner: mutifocal.meniconcalculator.com

Auswahl der ersten Linse	Verbesserungen der Fernsicht	Verbesserungen der Nahsicht
Add +0,75 dpt bis +1,25 dpt LOW Beide Augen	Ferne verbessern -0,25 dpt LOW Dominantes Auge	Plus erhöhen -0,25 dpt LOW Nicht dominantes Auge
Add +1,50 dpt bis +1,75 dpt LOW Beide Augen	Ferne verbessern -0,25 dpt LOW Dominantes Auge	Zur HIGH wechseln * HIGH Beide Augen
Add +2,00 dpt und höher HIGH Beide Augen	Ferne verbessern -0,25 dpt HIGH Dominantes Auge	Plus erhöhen -0,25 dpt HIGH Nicht dominantes Auge

Allgemeine Tipps:

Erhöhen Sie immer zuerst das Plus für die Ferne, bevor Sie die Addition erhöhen. Zur Optimierung des Sehens verwenden Sie bitte Prüfgläser oder Vorhalter. Es sind auch binokulare Verbesserungen möglich.

* Die zusätzlichen +0,50 dpt nehmen Sie für die Auswahl der Linse wieder weg.

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition
8,40	+5,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung	14,20	LOW, HIGH
	-6,50 bis -10,00 in 0,50 dpt Abstufung		

Miru 1day Flat Pack

Art.-Nr. 1381

Hydrogel Tageslinse



Material:

HEMA; GMA (Hioxfilcon A)

- Wassergehalt: 57% (nicht-ionisch, FDA Gruppe I)
- Handlingstint: hellblau

Eigenschaften:

- Biasphärisches Design
- CENTRAFORM Rand-Design
– besonders dünn und sanft
- Smart Touch™ Technologie
- Superdünne Verpackung: nur 1mm dünn

Vorteile:

- ▶ Hohe optische Abbildungsqualität
- ▶ Besonders komfortabel
- ▶ Die Linse liegt immer richtig herum im Blister, lässt sich leicht entnehmen und hygienisch und sicher aufsetzen
- ▶ Braucht wenig Platz
- ▶ Umweltfreundlich

Weniger Abfall mit Miru 1day Flat Pack

Weniger Rohstoffe

Bei der Verpackung wird weniger Material verbraucht.



Weniger Abfall

Ein Jahresbedarf an Miru 1day Flat Pack Linsen (730 Blister) erzeugt im Vergleich zu herkömmlichen Blistern nur 20 % der Abfallmenge.



Miru 1day Flat Pack



Herkömmliche Blister

Fokus auf die Umwelt

Zur Produktion der Boxen wird bei der Herstellung verwendeter recycelter Kunststoff verwendet. Die Verpackung ist recycelbar.



Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
8,60	+4,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung -6,50 bis -10,00 in 0,50 dpt Abstufung	14,20


Miru 1day Flat Pack toric

Art.-Nr. 1382

Hydrogel Tageslinse



Design:

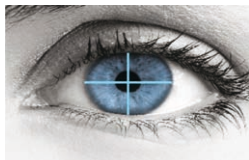

Biasphärisches dünneres, torisches Design:

- Smart Fit: stabilisiert sicher und genau
- Orientiert sich an der Anatomie der Augenlider
- Minimiertes Dickenprofil
- CENTRAFORM™: dünnerer Rand
- Kontrolle der sphärischen Aberration

Weitere Informationen zur Smart Touch™ Technologie finden Sie auf den Seiten 13-14.

Eigenschaften:

- Smart Fit: auf die Anatomie der Augenlider abgestimmtes dynamisch-asymmetrisches Stabilisationssystem
- Vertikaler Doppel-Slab-off
- Biasphärisches Design reduziert sphärische Aberrationen
- Smart Touch™ Technologie
- Ultradünner Blister: nur 1 mm dünn

Vorteile:

- ▶ Hoher Komfort
- ▶ Automatischer korrekter Sitz der Linse, egal wie sie aufgesetzt wird
- ▶ Optimale Stabilisation – gleichbleibend klares Sehen
- ▶ Kleine Abweichungen der Achse beeinträchtigen nicht die Sehleistung
- ▶ Einfache und hygienische Handhabung
- ▶ Braucht wenig Platz
- ▶ Umweltfreundlich



Für eine einfache und schnelle Anpassung, nutzen Sie den Menicon Linsenrechner: toric.meniconcalculator.com


Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Wirkung Cyl (dpt)	Durchmesser (mm)
8,60	+2,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung -6,50 bis -10,00 in 0,50 dpt Abstufung	-0,75, -1,25, - 1,75 Achsen: 15°, 90°, 165 und 180° (-1,75 nur mit 180°)	14,50

Miru 1day Flat Pack multifocal

Art.-Nr. 1383

Hydrogel Tageslinse

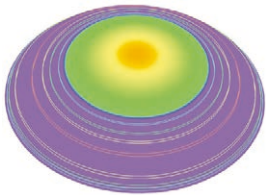

LOW

Neuro Adaptive™ Design - Nähe im Zentrum

Schnelle Eingewöhnung durch sanfte Übergänge zwischen den Entfernungen. Das dünne bi-asphärische Design verbessert den Komfort und das Sehen. Es bietet eine größere Tiefenschärfe.

Erfolgreiche Anpassung mit Miru 1day Flat Pack multifocal

Anpassempfehlung:

- So viel Plus wie möglich in der Fernrefraktion
- Berücksichtigung des HSA ($>+/-4$ dpt) und des mittleren sphärischen Äquivalents für Astigmatismen bis zu 1 dpt
- Bestimmen Sie das dominante Auge
- Auswahl der ersten Addition. Verbesserungen der Sphäre sind üblicherweise nicht notwendig. Erhöhen Sie immer zuerst das Plus für die Ferne. Dies wird meist akzeptiert.



Für eine einfache und schnelle Anpassung, nutzen Sie den Menicon Linsenrechner: mutifocal.meniconcalculator.com

Auswahl der ersten Linse	Verbesserungen der Fernsicht	Verbesserungen der Nahsicht
Add +0,75 dpt bis +1,25 dpt LOW Beide Augen	Plus verbessern -0,25 dpt LOW Dominantes Auge	Plus erhöhen +0,25 dpt LOW Nicht-dominantes Auge
Add +1,50 dpt und darüber LOW Beide Augen	Plus verbessern -0,25 dpt LOW Dominantes Auge	Plus erhöhen +0,25 dpt LOW Nicht-dominantes Auge

Allgemeine Tipps:

Erhöhen Sie immer zuerst das Plus für die Ferne, bevor Sie die Addition erhöhen. Zur Optimierung des Sehens verwenden Sie bitte Prüfgläser oder Vorhalter. Es sind auch binokulare Verbesserungen möglich.

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition
8,40	+5,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung	14,20	LOW
	-6,50 bis -10,00 in 0,50 dpt Abstufung		

Menisoft S

Silikon-Hydrogel 14-Tageslinse



Material:

Silikon-Hydrogel (Asmofilcon A)

- 7 Tage / 6 Nächte Dauertragen
- Dk/t 161
[bei -3,00dpt (cyl. -1,25 dpt 180°) (c.t. 0,08 mm)]
- Wassergehalt: 40% (nicht-ionisch, FDA Gruppe I)
- Handlingstint: blue
- E-Modul: 0,9 Mpa
- Benetzungswinkel: 27° (*captive bubble method*)

Pflegeempfehlung:

BIOcare All-in-One-Lösung
oder
OXIcare Peroxidsystem



Eigenschaften:

MeniSilk™

Materialeigenschaften:

- Innovative Monomer-Formulierung mit einzigartigem Polymerisationsverfahren

NanoGloss™

Oberflächentechnologie:

- Kontrolliert geschmeidige, ultraglatte Oberfläche

Vorteile:

- ▶ Optimale Sauerstoffdurchlässigkeit
 - Dk/t: 161 mmHg
 - 7 Tage / 6 Nächte Dauertragen
- ▶ Sehr hohe Lipidresistenz
- ▶ Sehr gute Benetzungseigenschaften
 - Benetzungswinkel 27°
- ▶ Hohe Transparenz

Menisoft S

Art.-Nr. 1361

Silikon-Hydrogel 14-Tageslinse




Anpassung und Tipps:

- Basiskurve **8,30** ist aufgrund der Materialeigenschaften und Geometrie die erste Wahl
- **80%** aller erfolgreichen Anpassungen werden mit **8,30** gemacht
- Brillenwerte auf HSA 0 rechnen
- Auf reguläre Bewegung achten

- **Handhabungshilfen:**


Handhabungstönung: hellblau

Umstülpmarkierung: Menicon Logo und Basiskurve

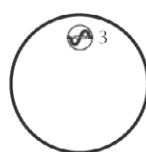

BK: 8,30

von innen lesbar

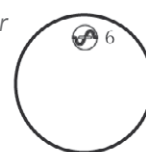

BK: 8,60

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
8,30 und 8,60	Lieferbereich +6,00 bis +0,25 -0,25 bis -13,00	14,00
	bis -6,00 in 0,25 Abstufung ab -6,50 in 0,50 Abstufung	

Menisoft S toric

Art.-Nr. 1362


Silikon-Hydrogel 14-Tageslinse



Design:

Visiostable Design™

Asymmetrischer Double Slab-off,
der Lidanatomie angepasst für
ausgezeichnete Stabilisation

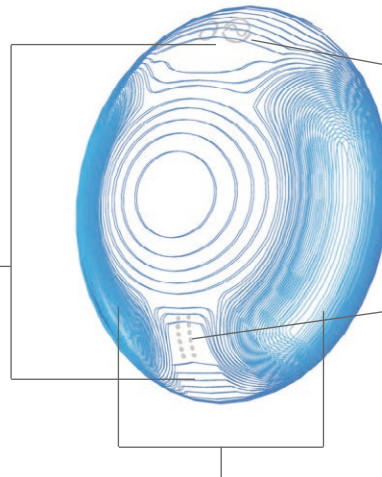

Handhabungs- und Umstülpmarkierung
(Menicon-Logo und Basiskurve)
für einfache Handhabung

Gut sichtbare Stabilisationsmarkierung
Doppelstrich bei 6 Uhr

Dynamische Stabilisationszone
für stabile Achslage


Anpassung und Tipps:

- Brillenwerte auf HSA 0 rechnen
- Bei vom Lieferbereich abweichenden Zylinder und Achse, nächst geringeren Zylinderwert und nächstliegende Achse auswählen

Beispiel:

Refraktion: -3,00 dpt -1,00 dpt 178°
Menisoft S Torisch:
8,60 -3,00 dpt -0,75 dpt 180° 14,00

Das Logo und die Basiskurve müssen von innen lesbar sein.
Die Doppelstrichmarkierung befindet sich bei 6 Uhr.

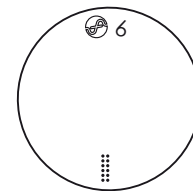

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung Sph (dpt)	Wirkung Cyl (dpt)	Durchmesser (mm)
8,60	0,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung	-0,75; -1,25 Achse: 180°; 170°; 160°; 90°; 20°; 10°	14,00
	-6,50 bis -10,00 in 0,50 dpt Abstufung	-1,75 Achse: 180°; 170°; 160°; 20°; 10°	

Kleiner Durchmesser erleichtert
die Handhabung

Miru 1month

Silikon-Hydrogel Monatslinse



Gleicher hoher DK/t-Wert für
sphärisch, torisch und multifokal!

Material:

Silikon-Hydrogel (Asmofilcon A)

- Dk/t 161
(c.t. 0,08 mm -3,00 dpt / -1,25 dpt 180°)
- Wassergehalt: 40% (nicht-ionisch, FDA Gruppe I)
- Handlingstint: blue
- E-Modul: 0,9 Mpa
- Benetzungswinkel: 27° (*captive bubble method*)

Pflegeempfehlung:

BIOcare All-in-One-Lösung
oder
OXIcare Peroxidsystem



Eigenschaften:

MeniSilk™

Materialeigenschaften:

- Innovative Monomer-Formulierung mit einzigartigem Polymerisationsverfahren


NanoGloss™

Oberflächentechnologie:

- Kontrolliert geschmeidige, ultraglatte Oberfläche
- **Gleichbleibend dünne Randgestaltung** über alle Stärken

Vorteile:

- ▶ Optimale Sauerstoffdurchlässigkeit
– Dk/t: 161 mmHg
- ▶ Sehr hohe Lipidresistenz
- ▶ Sehr gute Benetzungseigenschaften
– Benetzungswinkel 27°
- ▶ Hohe Transparenz
- ▶ Gleich guter Komfort bei allen Stärken

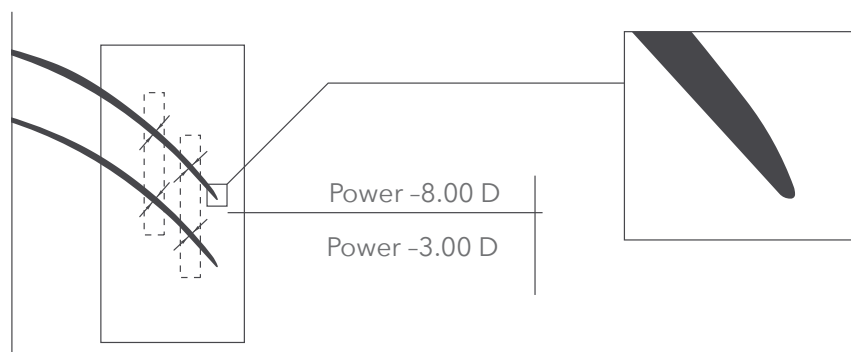

Miru 1month

Art.-Nr. 1371

Silikon-Hydrogel Monatslinse



Design:

- Sphärische optische Zone, asphärische Peripherie


Anpassung und Tipps:

- Basiskurve **8,30** ist aufgrund der Materialeigenschaften und Geometrie die erste Wahl
- **80%** aller erfolgreichen Anpassungen werden mit **8,30** gemacht
- Brillenwerte auf HSA 0 rechnen
- Auf reguläre Bewegung achten

- **Handhabungshilfen:**


Handhabungstönung: hellblau

Umstülpmarkierung: Menicon Logo und Basiskurve

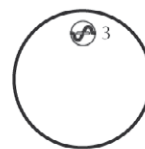

BK: 8,30

von innen lesbar

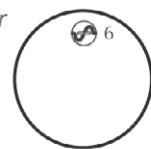

BK: 8,60

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
8,30 und 8,60	+6,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung	14,00
	-6,50 bis -13,00 in 0,50 dpt Abstufung nicht in plan erhältlich	

Zwei Basiskurven für
mehr Flexibilität

Miru 1month toric

Art.-Nr. 1372

Silikon-Hydrogel Monatslinse




Design:

Visiostable Design™

Asymmetrischer Double Slab-off, angepasst an die Lidanatomie

Ausgezeichnete horizontale dynamische Stabilisierung

Prismenfreie optische Zone

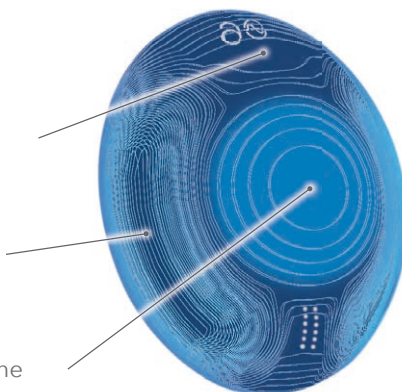

Achten Sie beim Aufsetzen der Linse auf die Markierung. Das Menicon Logo sollte sich auf 12 Uhr und Strichmarkierung auf 6 Uhr befinden.

Anpassung und Tipps:

- Brillenwerte auf HSA 0 rechnen
- Bei vom Lieferbereich abweichenden Zylinder und Achse, nächst geringeren Zylinderwert und nächstliegende Achse auswählen


Beispiel:

Refraktion: -3,00 dpt -1,00 dpt 178°

Miru 1month Toric:

8,60 -3,00 dpt -0,75 dpt 180° 14,00

Das Logo und die Basiskurve müssen von innen lesbar sein. Die Doppelstrichmarkierung befindet sich bei 6 Uhr.

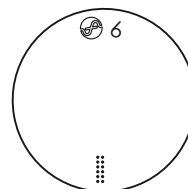

Für eine einfache und schnelle Anpassung, nutzen Sie den Menicon Linsenrechner: toric.meniconcalculator.com

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Wirkung Cyl (dpt)	Durchmesser (mm)
8,60	+4,00 bis + 0,25 in 0,25 dpt Abstufung	0,75; -1,25; -1,75 (-2,25 in Planung) Achse von 0° bis 180° in 10° Abstufung	14,00
	plano bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung		
	-6,00 bis -10,00 in 0,50 dpt Abstufung		

Kleiner Durchmesser erleichtert die Handhabung

Miru 1month multifocal

Art.-Nr. 1373

Silikon-Hydrogel Monatslinse



Design:

- Simultansystem, Nähe im Zentrum

HIGH Design


Patentierte, dezentrierte Nahzone

Dezentrierte Nahzone.
Einzigartig!

Visiostable Design™

Vertikaler, asymmetrischer
Double Slab-off, angepasst
an die Lidanatomie

Stabiler Sitz durch
horizontale dynamische
Stabilisationszonen

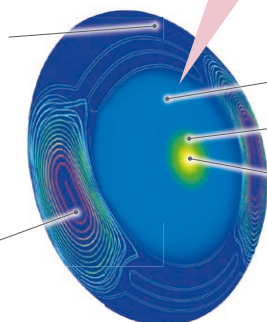


- Brillantes Sehen trotz hoher Additionen
- Keine Kompromisse zwischen Ferne und Nähe
- Exzellenter Tragekomfort

LOW Design

Konzentrische, zentrale Nahzone

Ferne
Progressions-
zone
Nähe

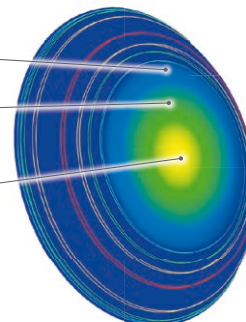

- Perfekt ausbalancierte Sehzone
- Ausgezeichneter Kontrast


Anpassung und Tipps:

- Brillenwerte auf HSA 0 rechnen
- Führungsauge bestimmen (sensorische Dominanz)
- Berechnen der ersten Linse mit dem Anpassguide

Tipps

- Machen Sie eine ausführliche Bedarfsanalyse
- Nutzen Sie den Miru 1month Multifocal Anpassguide
- **LOW Design** bis Addition +2,25 dpt anpassen
- **HIGH Design** ab Addition +2,50, Ferne voll auskorrigieren, blaue Pfeilmarkierung temporal aufsetzen (dezentrierte Nahzone muss nasal sitzen)

Wichtig beim HIGH Design: blaue
Pfeilmarkierung temporal aufsetzen.

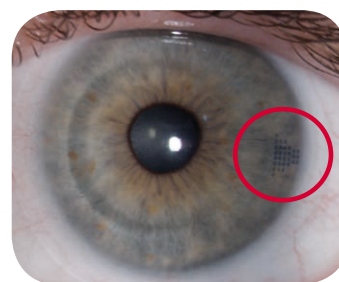

Für eine einfache und schnelle
Anpassung, nutzen Sie den
Menicon Linsenrechner:
multifocal.meniconcalculator.com

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition
8,60	+6,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung	14,20	LOW HIGH
	-6,50 bis -13,00 in 0,50 dpt Abstufung		

Menisoft

Art.-Nr. 1351

Hydrogel Monatslinse



Material:

Hydrogel (Mipafilcon A II 3)

- Dk/t 42,5 bei 3,00 dpt (c.t. 0,08 mm)
- DK: 34
- Wassergehalt: 72%
(nicht-ionisch, FDA Gruppe II)
- E-Modul: 0,66 Mpa
- Handlingstint: aqua-green

Pflegeempfehlung:

BIOcare All-in-One-Lösung
oder
OXIcare Peroxidsystem



Eigenschaften:

- Exzellente Wasserbindung
- Glatte Oberfläche
- Bi-asphäre

Vorteile:

- ▶ Gute Benetzung
- ▶ Geringe Ablagerungs- und Abtrocknungsneigung
- ▶ hohe optische Abbildungsqualität

Design:

- **Biasphärische Geometrie**
- Ausgewogen dünnes Linsenprofil
- Komfortable dünne Randgestaltung
- **Handhabungshilfe:**
Handhabungstönung: aqua-green

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
8,60	-0,25 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung	14,20
	-6,50 bis -10,00 in 0,50 dpt Abstufung	



Formstabile Linsen

Formstabile Linsen

Rotationssymmetrisch

Sphärisch / Asphärisch

Comfort	34
Comfort Symbio	34
Omni	36
Omni Symbio	36
Z	37
E	38
Z Alpha	39
EX	40

Torisch

Rücktorisch

Comfort BTC/BT	42
Comfort Symbio BTC/BT	42
Omni BTC/BT	44
Omni Symbio BTC/BT	44
Omni FT	46

Multifokal

Simultan

Comfort Progressive	48
Comfort Progressive BTC/BT	48
Comfort Progressive+	50
Comfort Progressive Inverse	51
Omni Progressive	52
Omni Progressive BTC/BT	52
Omni Progressive+	54
Omni Progressive+ BTC/BT	54
Omni Progressive Inverse	56

Alternierend

Menifocal Z	57
Omni Executive	58

Orthokeratologie

Z Night	60
Z Night Toric	60

Keratokonius

Rose K2 KC™	63
Rose K2 PG™	64
Rose K2 IC™	65
Rose K2 NC™	66
Rose K2 XL™	67
Trial Sets	68
Z Alpha E-1	69
EX E-1	69



Menicon Comfort Design

Drei außergewöhnliche Eigenschaften machen das Menicon Comfort Design aus:

- **Großer Durchmesser**
 - **Tränenreservoir**
 - **Tangentiale Randgestaltung**
- ▶ Geringes Linsenempfinden, hoher Tragekomfort
 - ▶ Optimaler Tränen austausch
 - ▶ Zentrischer Sitz, gleichmäßige Bewegung


Optional: Symbio Design

Asphärische Vorderfläche zur Akkommodationsentlastung

Vergleich Sitzverhalten:



Standard Design

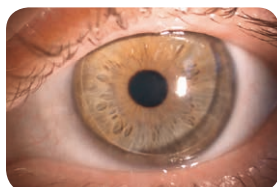

Comfort Design



Fluobild



Durchmesser

Comfort Design - optimaler Sitz

Für optimale Anpasserfolge mit dem **Menicon Comfort Design** beachten Sie bitte die folgenden Aspekte:

Drei Durchmesser

11,0 mm 10,6 mm 10,2 mm

Beginnen Sie mit 10,6 mm!

Der Durchmesser der Comfort Linse sollte mindestens 1,0 mm kleiner als der Hornhaut-Durchmesser sein.

Tränenreservoir

Das Tränenreservoir sorgt für optimalen Tränen austausch.

Setzen Sie die Comfort Linsen immer mit Flüssigkeit gefüllt auf, dadurch erleichtern Sie das Aufsetzen und erhöhen den Spontankomfort.




Tipp: Nutzen Sie dafür z.B. einige Tropfen MENICARE PURE.

Tangentiale Randgestaltung

Unsere Empfehlung: Für optimale Ergebnisse arbeiten Sie mit Ihrem Topographen. Dieser liefert eine detaillierte Aufschlüsselung bis in die Hornhautperipherie.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihr Topograph regelmäßig kalibriert wird.

Torische Rückflächen

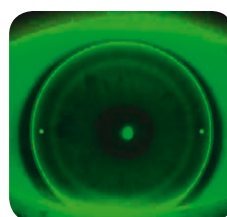

Ab einer Radiendifferenz von 3/10 mm sollten Sie, aufgrund des großen Durchmessers, eine torische Rückfläche anpassen.

Formstabile Linsen

Menicon Materialien:

! Soweit nicht anders vermerkt, erhalten Sie alle formstabilen Kontaktlinsen in zwei hochsauerstoffdurchlässigen Materialien:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau


EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Menicon Plasma Technologie für optimale Benetzung

Menicon Kontaktlinsen werden nach der Herstellung poliert und gereinigt, und danach in einem speziellen Prozess abschließend geglättet. Dabei werden feinste Unebenheiten entfernt. Die Kontaktlinsen sind dadurch perfekt benetzbar.

Bitte verwenden Sie keine abrasiven Reiniger!

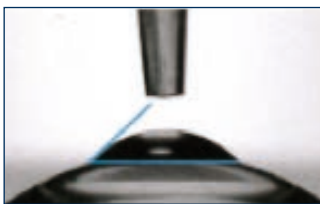

Schlechte Benetzung
Ohne Plasmabehandlung




Gute Benetzung
Mit Plasmabehandlung

Sauerstoffdurchlässigkeit:

Die Sauerstoffversorgung der Hornhaut beim Tragen von Kontaktlinsen aus dem hypergasdurchlässigen **Menicon Z Material** entspricht annähernd jener ohne Kontaktlinsen.

Das **EX Material** bietet im Hoch-Dk-Bereich eine bessere O₂-Versorgung, als sie das Auge in geschlossenem Zustand erfährt.

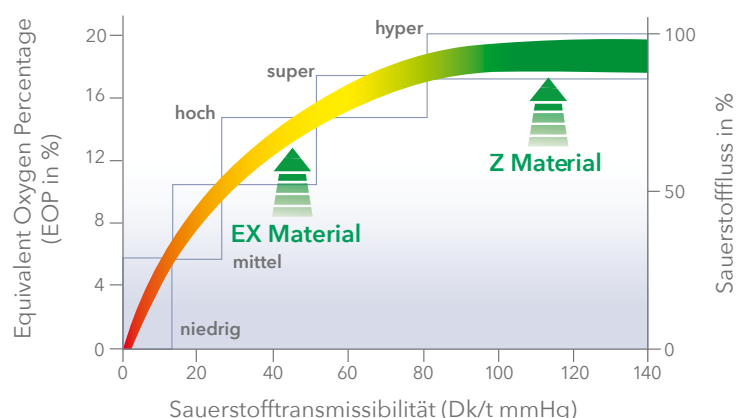

Material:

Eigenschaften technisch	Menicon Z	Menicon EX
Material	Tisilfocon A	Tolofoccon A
Kunststoffgruppe	MMA + SI + F	MMA + SI + F
Extended Wear	ja	ja
Sauerstoff-Durchlässigkeit DK	163	64
Handlingstint	eisblau	eisblau
Lasermarkierung	Herstellungszeitraum + Lotnummer	Herstellungszeitraum + Lotnummer
Brechzahl	1,440	1,438
Härte (Shore)	83	81
spezifisches Gewicht	1,20	1,165
UV-Absorber	ja	nein
Benetzungswinkel	≈ 0 Ionisierung der Oberflächen	≈ 0 Ionisierung der Oberflächen
Ionisierte Oberfläche	ja	ja
Abrasive Reiniger	Nein	Nein
Nutzungszeitraum	12 bis 18 Monate	12 bis 18 Monate

Comfort Art.-Nr. 1252

tangentiale Randgestaltung – hoher Tragekomfort

Comfort Symbio Art.-Nr. 1256

tangentiale Randgestaltung / asphärische Vorderfläche – hoher Tragekomfort und Akkommodationsentlastung

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Großer Durchmesser
- Tränenreservoir
- Tangentiale Randgestaltung
- **Option Symbio: asphärische Vorderfläche**

Vorteile:

- ▶ Hoher Tragekomfort
- ▶ Optimaler Tränen austausch
- ▶ Zentrischer Sitz
- ▶ **Akkommodationsentlastung**

Design:

Rückfläche

- Zentral sphärische optische Zone, umgeben von einer Tränenreservoirzone
- Periphere tangential verlaufende Auflagezone für eine optimale Zentrierung

Vorderfläche

- Große sphärische optische Zone, abhängig vom Scheitelbrechwert
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur
- Symbio-asphärische Vorderfläche

**Ideal für Neuträger und Umstellung
von weich auf formstabil.**

**Weitere Informationen zum
Comfort Design finden Sie
auf Seite 31.**

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)		
parallel zum flachen HH-Radius, passen Sie ab 0,30 mm Radiendifferenz eine torische Rückfläche an	10,20	10,60	11,00
	HH-Durchmesser bis 11,60	HH-Durchmesser 11,70 bis 12,00	HH-Durchmesser ab 12,10

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	10,20 / 10,60 / 11,00

Omni Art.-Nr. 1253

sphärisch – asphärisch

Omni Symbio Art.-Nr. 1254

sphärisch- asphärisch / asphärische Vorderfläche – Akkommodationsentlastung

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Sphärisch-asphärisches Design
- Option Symbio: asphärische Vorderfläche

Vorteile:

- ▶ Stabile Optik bei optimalem Sitzverhalten
- ▶ Akkommodationsentlastung

Design:

Rückfläche

- Große sphärische Zone
- Asphärische Peripherie
- Axial Edge Lift

Vorderfläche

- Große sphärische optische Zone
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur
- Symbio – asphärische Vorderfläche

Als Sonderanfertigung mit Prismenballast erhältlich

Anpassung und Tipps:

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
6,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung

Z Art.-Nr. 1241

bi-asphärisch

Material:

- Z**
- Dk: 163
 - UV Filter
 - Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



30 Tage Dauertragen

Eigenschaften:

- Bi-asphärisches Design
- Asphärische Vorderfläche
- Asphärische Rückfläche
- Hoher Dk/t 125

Vorteile:

- ▶ Schlankstes Menicon Design
- ▶ Best mögliche Korrektur der sphärischen Aberration
- ▶ Guter Gleichlauf bei sanftem Linsensitz
- ▶ FDA Zulassung zum Dauertragen für 30 Tage und 29 Nächte

Design:

Rückfläche

- Vollasphärisch ($\varepsilon = 0,35$) für gleichmäßige Druckverteilung

Vorderfläche

- Vollasphärisch, zur Korrektur der sphärischen Aberration der Kontaktlinse
- Große optische Zone

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
6,80 bis 9,00 in 0,10 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 10,00 in 0,20 mm Abstufung

E Art.-Nr. 1242

asphärisch mit variabler Exzentrizität

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Exzentrizität von 0,40 / 0,60 / 0,80
- Asphärische Rückfläche

Vorteile:

- Optimale Anpassung auch bei peripherer Abflachung außerhalb der Norm
- Ideale Druckverteilung

Design:

Rückfläche

- Sphärische optische Zone (4,20 mm)
- An optische Zone anschließende variable Asphäre (0,40 / 0,60 / 0,80)

Vorderfläche

- Sphärische optische Zone, abhängig vom Scheitelbrechwert
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Anpassung und Tipps:

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Exzentrizität
6,50 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung	0,40 / 0,60 / 0,80

Als Sonderanfertigung mit Prismenballast erhältlich (1,00 pdpt bis 2,50 pdpt in 0,50 pdpt Abstufung).

Z Alpha

Art.-Nr. 1251

sphärisch-asphärisch

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



30 Tage Dauertragen

Eigenschaften:

- Sphärisch-asphärisches Design
- Hoher Dk/t 109 mmHg

Vorteile:

- ▶ Sanfte und gleichmäßige Bewegung
- ▶ FDA Zulassung zum Über-Nacht-Tragen
30 Tage und 29 Nächte

Design:

Rückfläche

- Große sphärische Zone
- Asphärische Peripherie

Vorderfläche

- Große sphärische optische Zone

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
flacher HH-Meridian +0,10 mm	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
6,50 bis 9,00		8,00 bis 9,80
6,70 bis 9,00		10,00
7,30 bis 9,00	+25,00 bis -25,00	10,50
7,50 bis 9,00	in 0,25 dpt Abstufung	11,00
in 0,05 mm Abstufung		in 0,20 mm Abstufung

EX Art.-Nr. 1211

sphärisch-asphärisch

Material:

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Sphärisch-asphärisches Design
- Dk 64

Vorteile:

- ▶ Anpassung von Standard Kontaktlinsen
- ▶ Ideal bei der Umstellung von Kontaktlinsen im Standard Design mit niedrigem Dk

Design:

Rückfläche

- Sphärische optische Zone, asphärische Randgestaltung
- Axial Edge Lift: 0,10 mm

Vorderfläche

- Sphärische optische Zone

Anpassung und Tipps:

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	9,60

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)		Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	
6,20 bis 8,00	6,50 bis 8,80	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,00	9,20
6,20 bis 8,10	6,50 bis 8,90		8,20	9,40
6,20 bis 8,20	6,50 bis 9,00		8,40	9,60 / 9,80
6,20 bis 8,40	6,90 bis 9,00		8,60	10,00
6,30 bis 8,60	7,15 bis 9,00		8,80	10,50
6,50 bis 8,70	in 0,05 mm Abst.		9,00	

Comfort BTC/BT Art.-Nr. 1273/1274

bitorisch kompensiert /bitorisch – mit hohem Tagekomfort

Comfort Symbio BTC/BT Art.-Nr. 1292/1293

bitorisch kompensiert /bitorisch – mit hohem Tagekomfort und Akkommodationsentlastung

Material:

Z

- Dk: 163
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Großer Durchmesser, Standard 10,60 mm
- Tränenreservoir
- Tangentiale Randgestaltung
- **Option Symbio, asphärische Vorderfläche**


Vorteile:

- ▶ Hoher Tragekomfort und gute Zentrierung
- ▶ Verbesselter Tränen austausch
- ▶ Geringes Linsenempfinden
- ▶ **Akkommodationsentlastung**

Design:

Rückfläche

- Zentral torische optische Zone, umgeben von einer Tränenreservoirzone
- Periphere tangential verlaufende Auflagezone für eine optimale Zentrierung

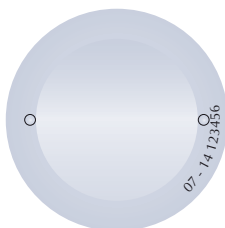

Vorderfläche

- Torisch, zur Korrektur des induzierten Astigmatismus/ Restzylinders
- 2 Punktgravuren markieren die Lage des flachen Rückflächenradius
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur
- Symbio-asphärische Vorderfläche

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) ab Δr 0,30 mm	Durchmesser (mm)		
$r_{(\text{flach})}$ = parallel zum flachen HH-Meridian	10,20	10,60	11,00
$r_{(\text{steil})}$ = steiler HH-Meridian +0,10 mm	HH-Durchmesser bis 11,60	HH-Durchmesser 11,70 bis 12,00	HH-Durchmesser ab 12,10

Lieferbereich:

Basiskurve BT (mm)	Wirkung Sph (dpt)	Durchmesser (mm)	BT Cyl. (dpt)
$r_{(\text{flach})}$ 7,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	10,20 / 10,60 / 11,00	0,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung, Achse von 0° bis 180° in 1° Abstufung
$r_{(\text{steil})}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(\text{flach})}$ in 0,05 mm Abstufung			

Basiskurve BTC (mm)
$r_{(\text{flach})}$ 6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung
$r_{(\text{steil})}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(\text{flach})}$ in 0,05 mm Abstufung

Omni BTC/BT Art.-Nr. 1282/1272

bitorisch kompensiert / bitorisch – Standarddesign

Omni Symbio BTC/BT Art.-Nr. 1275/1276

bitorisch kompensiert / bitorisch – Standarddesign mit Akkommodationsentlastung

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Durchmesserwahl von 8,80 mm bis 11.00 mm
- Sphärisch-asphärisches Design
- **Option Symbio: asphärische Vorderfläche**


Vorteile:

- ▶ Breite Parameterauswahl für individuelle Anpassung
- ▶ Stabile Optik bei optimalem Sitzverhalten
- ▶ **Akkommodationsentlastung**

Design:

Rückfläche

- Torische optische Zone, asphärische Peripherie (Basis: Omni)

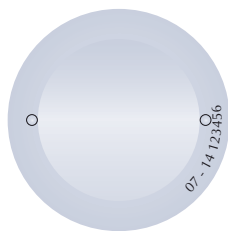

Vorderfläche

- Asphärisch
- Torisch, zur Korrektur des induzierten Astigmatismus/ Restzylinders
- 2 Punktgravuren markieren die Lage des flachen Rückflächenradius
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur
- Symbio-asphärische Vorderfläche

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) ab Δr 0,40 mm	Durchmesser (mm)
$r_{(\text{flach})}$ = parallel zum flachen HH-Meridian	10,00
$r_{(\text{steil})}$ = steiler HH-Meridian +0,10 bis +0,15 mm	

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung Sph (dpt)	Durchmesser (mm)	BT Cyl. (dpt)
$r_{(\text{flach})}$ 7,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung	0,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung, Achse von 0° bis 180° in 1° Abstufung
$r_{(\text{steil})}$ 0,20 bis 1,50 steiler als $r_{(\text{flach})}$ in 0,05 mm Abstufung			

Omni FT

Art.-Nr. 1283

fronttorisch

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Prisma von 1,00 bis 2,50 wählbar
- Fronttorus


Vorteile:

- ▶ Optimierung der Stabilisation
- ▶ Wenn rotationssymmetrische Rückfläche und Korrektur des Zylinders erforderlich ist

Design:

Rückfläche

- Sphärische optische Zone, asphärische Peripherie

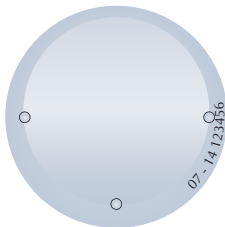

Vorderfläche

- Torisch, zur Korrektur astigmatischer Restfehler
- Prismenballast für stabile Zylinderkorrektion (Standard 1,50 pdpt)
- 3 Punktgravuren (0° / 180° / 270°) zur leichten Beurteilung der Stabilisation
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung Sph (dpt)	Wirkung Cyl (dpt)	Zylinderachse (°)
6,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	-0,75 bis -2,00 in 0,25 mm Abstufung	0° bis 180° in 1° Abstufung

Prisma (pdpt)	Durchmesser (mm)
1,00 bis 2,50 in 0,50 pdpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung

Comfort Progressive Art.-Nr. 1262

Comfort Progressive BTC/BT Art.-Nr. 1260/1259

Simultan: Zentral Ferne – sphärisch & torisch

Beachten Sie den
Menicon Multifokal-Leitfaden

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Zentral Fernzone
- Großer Durchmesser, Standard 10,60 mm
- Tränenreservoir
- Tangentiale Randgestaltung


Vorteile:

- ▶ Erste Wahl bei der Anpassung von Mehrstärken-Kontaktlinsen
- ▶ Hoher Tragekomfort und gute Zentrierung
- ▶ Verbesselter Tränen austausch
- ▶ Geringes Linsenempfinden

Design:

Rückfläche

- Zentral sphärische optische Zone, umgeben von einer Tränenreservoirzone
- Periphere tangential verlaufende Auflagezone für eine optimale Zentrierung (identisch zur Comfort)

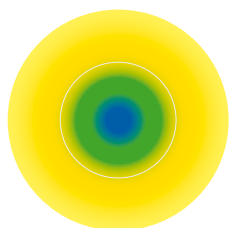

- Ferne
- Progressionszone
- Nähe

Vorderfläche

- Zentral asphärisch progressiv
– zentral: Fernzone (identisch zur Menicon Progressive)
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)		
$r_{(\text{flach})}$ = parallel zum flachen HH-Meridian	10,20	10,60	11,00
	HH-Durchmesser bis 11,60	HH-Durchmesser 11,70 bis 12,00	HH-Durchmesser ab 12,10

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	10,20 / 10,60 / 11,00	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung

Basiskurve BTC (mm)	Basiskurve BT (mm)	BT Cyl. (dpt)
$r_{(\text{flach})}$ 6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung	$r_{(\text{flach})}$ 7,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	0,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung Achse von 0° bis 180° in 1° Abstufung
$r_{(\text{steil})}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(\text{flach})}$ in 0,05 mm Abstufung	$r_{(\text{steil})}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(\text{flach})}$ in 0,05 mm Abstufung	

Comfort Progressive+ Art.-Nr. 1270

Simultan: Zentral Ferne mit vergrößerter Nahzone

Material:

- Z**
- Dk: 163
 - UV Filter
 - Handlingstint: eisblau

- EX**
- Dk: 64
 - Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- **Kürzere Progressionszone mit vergrößerter Nahzone**
- Großer Durchmesser, Standard 10,60 mm
- Tränenreservoir
- Tangentiale Randgestaltung

Vorteile:

- ▶ **Komfortableres Lesen**
- ▶ Hoher Tragekomfort und gute Zentrierung
- ▶ Verbesselter Tränenaustausch
- ▶ Geringes Linsenempfinden


Design:

Rückfläche

- Zentral sphärische optische Zone, umgeben von einer Tränenreservoirzone
- Periphere tangential verlaufende Auflagezone für eine optimale Zentrierung (identisch zur Menicon Comfort)

Vorderfläche

- Zentral asphärisch progressiv
– zentral: Fernzone, kurze Progressionszone, große Nahzone
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

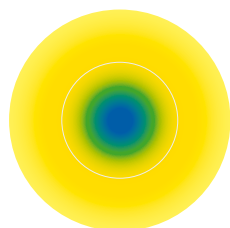

- Ferne
- Progressionszone
- Nähe

Nutzen Sie easyfit oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)		
$r_{\text{(flach)}}$ = parallel zum flachen HH-Meridian	10,20	10,60	11,00
	HH-Durchmesser bis 11,60	HH-Durchmesser 11,70 bis 12,00	HH-Durchmesser ab 12,10

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	10,20 / 10,60 / 11,00	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung

Comfort Progressive Inverse

Art.-Nr. 1258

Simultan: Zentral Nähe

Material:

- Z**
- Dk: 163
 - UV Filter
 - Handlingstint: eisblau

- EX**
- Dk: 64
 - Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN

Eigenschaften:

- **Zentral Nähe**
- Großer Durchmesser, Standard 10,60 mm
- Tränenreservoir
- Tangentiale Randgestaltung


Vorteile:

- ▶ **Außergewöhnlich hohe Ansprüche im Nahbereich**
- ▶ Hoher Tragekomfort und gute Zentrierung
- ▶ Verbesselter Tränen austausch
- ▶ Geringes Linsenempfinden

Design:

Rückfläche

- Zentral sphärische optische Zone, umgeben von einer Tränenreservoirzone
- Periphere tangential verlaufende Auflagezone für eine optimale Zentrierung (identisch zur Comfort)

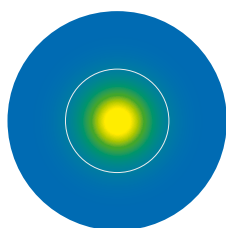

- Ferne
- Progressionszone
- Nähe

Vorderfläche

- Zentral asphärisch progressiv
– zentral: Nahzone
(identisch zur Omni Progressive Inverse)
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)		
parallel zum flachen HH-Meridian	10,20	10,60	11,00
	HH-Durchmesser bis 11,60	HH-Durchmesser 11,70 bis 12,00	HH-Durchmesser ab 12,10

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	10,20 / 10,60 / 11,00	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung

Omni Progressive Art.-Nr. 1264

Omni Progressive BTC/BT Art.-Nr. 1265/1269

Simultan: Zentral Ferne – sphärisch & torisch

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Zentral Fernzone
- Durchmesserwahl von 8,80 bis 11,00
- Sphärisch-asphärisches Design


Vorteile:

- ▶ Erste Wahl bei der Anpassung von Mehrstärken-Kontaktlinsen
- ▶ Breite Parameterauswahl für individuelle Anpassung
- ▶ Stabile Optik bei optimalem Sitzverhalten

Design:

Rückfläche

- Große sphärische Zone
- Asphärische Peripherie
- Axial Edge Lift

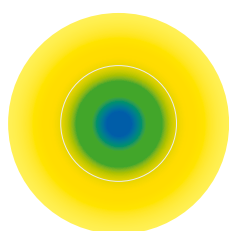

- Ferne
- Progressionszone
- Nähe

Vorderfläche

- Zentral asphärisch progressiv
– zentral: Fernzone
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung

Basiskurve BTC/BT (mm)	BT Cyl. (dpt)
$r_{\text{(flach)}}$ 7,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	0,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung Achse von 0° bis 180° in 1° Abstufung
$r_{\text{(steil)}}$ 0,20 bis 1,50 steiler als $r_{\text{(flach)}}$ in 0,05 mm Abstufung	

Omni Progressive+ Art.-Nr. 1266

Omni Progressive+ BTC/BT Art.-Nr. 1268/1267

Simultan: Zentral Ferne mit vergrößerter Nahzone – sphärisch & torisch

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Kürzere Progressionszone mit vergrößerter Nahzone
- Durchmesserwahl von 8,80 bis 11,00
- Sphärisch-asphärisches Design


Vorteile:

- ▶ Komfortableres Lesen
- ▶ Breite Parameterauswahl für individuelle Anpassung
- ▶ Stabile Optik bei optimalem Sitzverhalten

Design:

Rückfläche

- Große sphärische Zone
- Asphärische Peripherie
- Axial Edge Lift

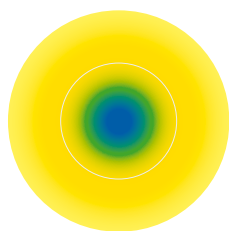

- Ferne
- Progressionszone
- Nähe

Vorderfläche

- Zentral asphärisch progressiv
– zentral: Fernzone, kurze Progressionszone, große Nahzone
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung

Basiskurve BTC/BT (mm)	BT Cyl. (dpt)
$r_{\text{(flach)}}$ 7,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	0,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung Achse von 0° bis 180° in 1° Abstufung
$r_{\text{(steil)}}$ 0,20 bis 1,50 steiler als $r_{\text{(flach)}}$ in 0,05 mm Abstufung	

Omni Progressive Inverse

Art.-Nr. 1257

Simultan: Zentral Nähe

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Zentral Nähe
- Sphärisch-asphärisches Design
- Durchmesserwahl von 8,80 bis 11,00


Vorteile:

- ▶ Außergewöhnlich hohe Ansprüche im Nahbereich
- ▶ Individuelle Anpassung
- ▶ Anpassung mit Standard Designs

Design:

Rückfläche

- Identisch zur Omni (zentral sphärische optische Zone, asphärische Peripherie)

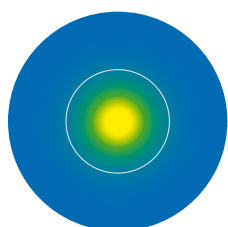

- Ferne
- Progressionszone
- Nähe

Vorderfläche

- Zentral asphärisch progressiv
– zentral: Nahzone
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,30 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung

Menifocal Z Art.-Nr. 1261

Alternierend: Zentral Ferne

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Alternierendes System
- konzentrisch angeordnete Fern-Nahzone

Vorteile:

- ▶ Große Fern- und Nahzone
- ▶ Keine Prismen zur Stabilisation notwendig

Design:

Rückfläche

- Große sphärische optische Zone, asphärische Peripherie (ähnlich Menicon Z Alpha)

Vorderfläche

- Zentral Fernzone
- Ringförmige Übergangszone (bewirkt bildsprungfreies Sehen)
- Peripher konzentrische Nahzone

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
flacher HH-Meridian +0,10 mm	9,80

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
7,00 bis 8,50	+5,00 bis -13,00	9,40 / 9,60 / 9,80	1,00 bis 2,50 in 0,50 dpt Abstufung
7,55 bis 9,00 in 0,05 mm Abstufung	+5,00 bis -10,00 in 0,25 dpt Abstufung		

Omni Executive

Art.-Nr. 1263

Alternierend: mit Trennlinie

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Bifokales System

Vorteile:

- Große Fern- und Nahzone

Design:

Rückfläche

- Identisch zur Omni (sphärische optische Zone, asphärische Peripherie)

Vorderfläche

- Horizontal segmentierte Trennlinie zwischen Ferne und Nähe (variable Höhe)
 - Standard 0,50 mm unter geometrischem Mittelpunkt
- Prismenballast (variabel; Standard 1,50 pdpt)
- Stutzkante (optional und variabel in 0,10 mm Abstufung)
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur

Anpassung und Tipps:

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Basiskurve (mm) Δr bis max. 0,40 mm	Durchmesser (mm)
parallel zum flachen HH-Meridian	10,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Addition (dpt)
6,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+5,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,80 bis 11,00 in 0,20 mm Abstufung	1,00 bis 3,00 in 0,50 dpt Abstufung

Trennlinie (mm)	Stutzkante (mm)	Prisma (pdpt)
0,50 höher / Standard / 0,50 tiefer	optional 0,10 bis 0,50 in 0,10 Abstufung	1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50

Z Night Art.-Nr. 1111

Z Night Toric Art.-Nr. 1112

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: rechts ROT / links BLAU

Nutzungszeitraum:

12 Monate

Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Eigenschaften:

- Z Night wird über Nacht getragen
- Berechnung, Bestellung und Kontrolle über **easyfit**
- Peripherer Defocus


Vorteile:

- ▶ Tagsüber scharfes Sehen ohne Brille oder Linsen
- ▶ Schnelle und genaue Berechnung der ersten Z Night, einfache Kontrolle der Topographie
- ▶ Wirkt der Myopieprogression entgegen

Design:

- Zentral Basiskurve entsprechend notwendiger Myopie- und Astigmatismuskorrektur
- Anschließende reverse Kurve
 - als Verbindung zur Tangentialzone
 - 3 Ventilationsbohrungen

- Tangentialzone für optimale Zentrierung

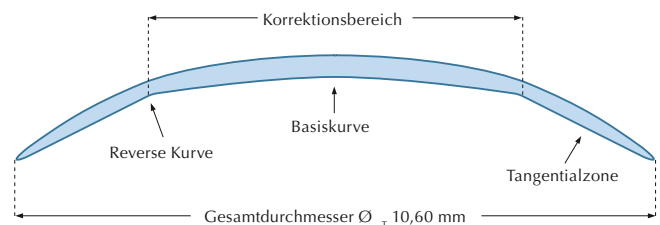


Einsatzbereich:


- Myopie bis -4,50 dpt
- Peripherer Hornhautastigmatismus rectus bis -2,50 dpt
- Peripherer Hornhautastigmatismus inversus bis -1,50 dpt

**Z Night Toric verbessert das Sitzverhalten,
korrigiert keinen Restzylinder**

Kontrolle der Topographie in easyfit: Bulls eye

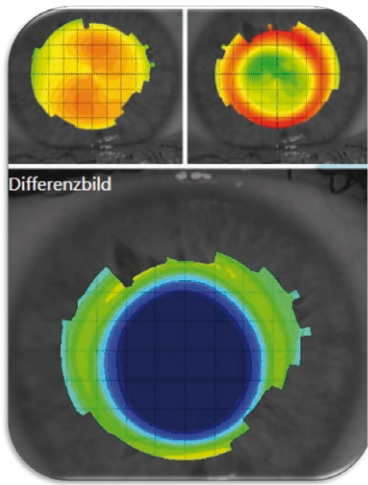

- Beurteilung sagittal
- Korrektur der Linse

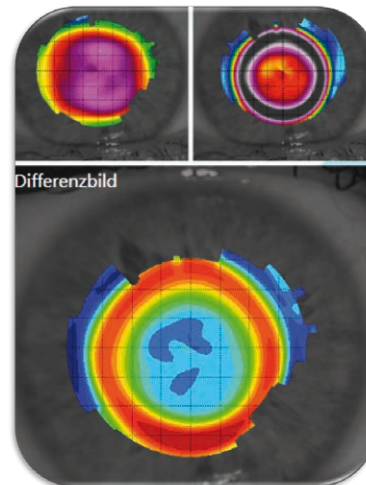

- Beurteilung tangential
- Zentrierung der Linse

Anpassung und Tipps:

- Topographie
- Aktuelle Refraktion
- Berechnung der Z Night ausschließlich über **easyfit**
- **Tragepause:**
 - Es sollte keine Veränderung der Hornhaut durch die zuvor getragenen Linsen mehr vorliegen
 - Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen: Erfahrungsgemäß 3 Tage
 - Formstabile Kontaktlinsen: Erfahrungsgemäß bis zu 4 Wochen

Kontrolle:

- **Nach der ersten Nacht**
 - Spaltlampe, Fluobild der Hornhaut ohne Linse
 - Topographie
- **Nach 1 Woche**
 - Ohne Linse
 - Spaltlampe, Fluobild der Hornhaut ohne Linse
 - Topographie
 - Visuscheck (ohne Linse)
 - 70% der Fehlsichtigkeit sollten korrigiert sein
- **Nach 3 Wochen**
 - Ohne Linse
 - Spaltlampe, Fluobild der Hornhaut ohne Linse
 - Topographie
 - Visuscheck (ohne Linse)
 - Fehlsichtigkeit sollte vollständig korrigiert sein
 - Falls notwendig Linsenänderung über **easyfit** vornehmen
- **Alle 6 Monate**
 - Ohne Linse
 - Spaltlampe, Fluobild der Hornhaut ohne Linse
 - Topographie
 - Visuscheck (ohne Linse)
 - Fehlsichtigkeit sollte vollständig korrigiert sein
 - Falls notwendig Linsenänderung über **easyfit** vornehmen

Bitte bestellen Sie Z Night Kontaktlinsen ausschließlich über **easyfit**.

Fünf unterschiedliche Designs ...

... ein einfaches systematisches Vorgehen bei der Anpassung

Passend für fast alle irregulären Hornhaut-Formen, -Lagen und -Stadien von Keratokonus.

Einzigartiges Linsen-Design, welches sich allen notwendigen Basiskurvenänderungen anpasst.

www.roseklens.com/practitioners

Vorteile:

- Einfache Anpassung durch systematisches Vorgehen bei allen Designs
- Einfache Anwendung des variablen Edge-Lift-Systems (periphere Geometrie)
- Beste optische Abbildungsqualität durch Aberrationskontrolle
- Minimales Linsengewicht durch bi-asphärisches Design
- Erweiterte Anpass-Optionen:
 - Peripher torische Geometrien (PT)
 - Asymmetrische-Cornea-Technologie (ACT)
 - Fronttorische, rücktorische und bitorische Geometrien


	ROSE K2 KC	ROSE K2 NC	ROSE K2 IC	ROSE K2 PG	ROSE K2 XL
PRIMÄRE INDIKATION	• Ovaler Keratokonus • Zentraler nippelförmiger Keratokonus	• Moderater bis sehr steiler nippelförmiger Keratokonus	• Pelluzide marginale Degeneration (PMD) • Keratoglobus • Lasik induzierte Ektasie • Zustand nach Keratoplastik	• Zustand nach Keratoplastik	Versorgung mit anderen ROSE K Designs nicht erfolgreich • Keratokonus • Pelluzide marginale Degeneration (PMD) • Zustand nach Keratoplastik • Lasik induzierte Ektasie
SEKUNDÄRE INDIKATION	• Pelluzide marginale Degeneration im Frühstadium	• Alle Varianten von nippelförmigem Keratokonus	• Ovaler Keratokonus	• Ovaler Keratokonus • Nippelförmiger Keratokonus • Lasik induzierte Ektasie	• Arbeitsbedingungen mit starker Staub- / Schmutzentwicklung • Stabiler Sitz bei Sport und Arbeit • Intoleranz von Standard-GP-Kontaktlinsen • Huckepack-Systeme

Verfügbarkeit:

ROSE K2 KC und ROSE K2 NC

85 % aller Versorgungen können mit Edge Lift Standard (0), Standard vergrößert (+1), Standard verkleinert (-0,5) durchgeführt werden


Maximum vergrößert +3,0
Standard vergrößert +1,0
Standard +0,0
Standard verkleinert -0,5
Maximum verkleinert -1,3

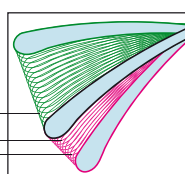

ROSE K2 IC und ROSE K2 PG sowie ROSE K2 XL

5 verschiedene Edge-Lift-Varianten stehen für die Versorgung zur Verfügung

Doppelt vergrößert
Standard vergrößert
Standard
Standard verkleinert
Maximum verkleinert

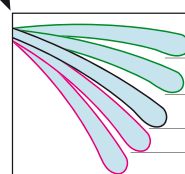

Rose K2 KC™

Art.-Nr. 1245

das am meisten angepasste Rose K2 Design

Material:

Z


- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Einsatzgebiet:

- Bei großem ovalen Konus
- Wenn die Ektasie nicht eindeutig ist

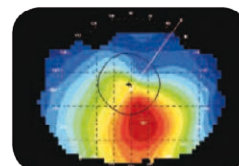

Design:

Rückfläche

- Zentral asphärische optische Zone
- Abflachende Peripherie (Variable Edge-Lift-Varianten)

Vorderfläche

- Asphärische optische Zone, zur Korrektur der sphärischen Aberration

Anpassung und Tipps:

Nutzen Sie **easyfit** zur Auswahl der ersten Testlinse aus dem Anpasssatz

Mittelwert der Hornhautradien	Basiskurve*
≥ 7,10 mm	0,20 mm steiler als der Hornhaut-Mittelwert
6,00 mm bis 7,00 mm	Parallel zum Hornhaut-Mittelwert
≤ 5,90 mm	0,40 mm flacher als der Hornhaut-Mittelwert

*Empfehlung für eine zentrale Messung innerhalb von 3 mm.

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Edge Lift
4,30 bis 8,60 in 0,05 mm Abstufung	+30,00 bis -30,00 in 0,25 dpt Abstufung	7,90 bis 10,40 in 0,10 mm Abstufung	+3 / +1 / 0 / -0,5 / -1,3

Anpassoptionen:

1. Variabler Edge Lift | 2. Torische Peripherie (PT) | 3. Asymmetrische-Cornea-Technologie (ACT) | 4. Torisch: rück-, front-, bitorisch

Rose K2 PG™

Art.-Nr. 1031

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate


Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Einsatzgebiet:

- Nach chirurgischem Eingriff
- Nach Lasik
- Nach Implantation von intracornealen Ringen
- Zur Versorgung von Keratoplastiken

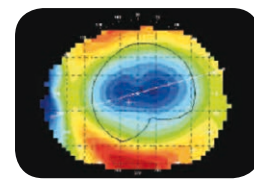

Design:

Rückfläche

- Zentral:
 - Große asphärische optische Zone zur Überbrückung des Transplantats, abhängig von der Basiskurve
 - Reverse Kurve, abhängig von der Basiskurve
- Peripher:
 - Steiler als bei Rose K2 KC
 - Variabler Edge Lift

Vorderfläche

- Asphärische optische Zone, zur Korrektur der sphärischen Aberration

Nutzen Sie **easyfit** zur Auswahl der ersten Testlinse aus dem Anpasssatz

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Mittelwert -0,30	Standard 10,40

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Edge Lift
5,70 bis 9,30 in 0,05 mm Abstufung, durchmesserabhängig	+30,00 bis -30,00 in 0,25 dpt Abstufung	9,40 bis 12,00 in 0,10 mm Abstufung	+3 / +2 / +1 / 0 / -1 / -2 / -3

Anpassoptionen:

1. Variabler Edge Lift | 2. Torische Peripherie (PT) | 3. Asymmetrische-Cornea-Technologie (ACT) | 4. Torisch: rück-, front-, bitorisch

Rose K2 IC™

Art.-Nr. 1021

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate


Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Einsatzgebiet:

- Bei PMD
- Keratoglobus
- Lasik induzierte Ektsie

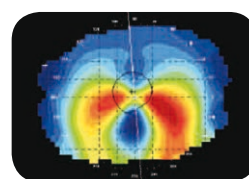

Design:

Rückfläche

- Zentral:
 - Große asphärische optische Zone - abhängig von der Basiskurve
 - Reverse Geometrie bei großem Durchmesser
- Peripher:
 - Steiler als bei Rose K2 KC
 - Variabler Edge Lift

Vorderfläche

- Asphärische optische Zone, zur Korrektur der sphärischen Aberration

Anpassung und Tipps:

Nutzen Sie **easyfit** zur Auswahl der ersten Testlinse aus dem Anpasssatz

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
Steiler HH-Radius +0,30	Standard 11,20

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Edge Lift
5,70 bis 9,30 in 0,05 mm Abstufung, durchmesserabhängig	+30,00 bis -30,00 in 0,25 dpt Abstufung	9,40 bis 12,00 in 0,10 mm Abstufung	+2 / +1 / 0 / -1 / -3

Anpassoptionen:

1. Variabler Edge Lift | 2. Torische Peripherie (PT) | 3. Asymmetrische-Cornea-Technologie (ACT) | 4. Torisch: rück-, front-, bitorisch

Rose K2 NC™

Art.-Nr. 1011

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate


Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Einsatzgebiet:

- Bei sehr kleinem zentralen Konus, meist sehr steile Radien

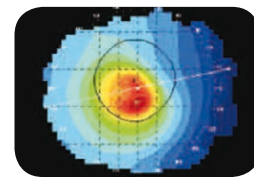

Design:

Rückfläche

- Zentral:
 - Kleine asphärische optische Zone, angepasst an die steile Form der Hornhaut
 - Durchmesser abhängig von der Basiskurve - je steiler, desto kleiner
- Peripher:
 - Schnelle periphere Abflachung
 - Variabler Edge Lift

Vorderfläche

- Asphärische optische Zone, zur Korrektur der sphärischen Aberration
- Durchmesser der optischen Zone größer als der der Rückfläche

Nutzen Sie **easyfit** zur Auswahl der ersten Testlinse aus dem Anpasssatz

Anpassung und Tipps:

Mittelwert der Hornhautradialen	Basiskurve*
> 6,00 mm	0,20 mm steiler als der Hornhaut-Mittelwert
5,10 mm bis 6,00 mm	Parallel zum Hornhaut-Mittelwert
< 5,00 mm	0,30 mm flacher als der Hornhaut-Mittelwert

*Empfehlung für eine zentrale Messung innerhalb von 3 mm.

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Edge Lift
4,30 bis 7,70 in 0,05 mm Abstufung, durchmesserabhängig	+30,00 bis -30,00 in 0,25 dpt Abstufung	7,60 bis 9,00 in 0,10 mm Abstufung	+2 / +1 / 0 / -1 / -2

Anpassoptionen:

1. Variabler Edge Lift | 2. Torische Peripherie (PT) | 3. Asymmetrische-Cornea-Technologie (ACT) | 4. Torisch: rück-, front-, bitorisch

Rose K2 XL™

Art.-Nr. 1041

Material:

Z

- Dk: 163
- UV Filter
- Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate






Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Einsatzgebiet:

- Wenn die Anpassung mit anderen Rose K2 Designs nicht erfolgreich war
- Wenn der Linsenträger starke Komfortprobleme mit Corneallinsen hat

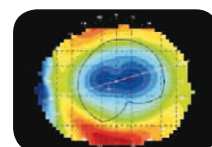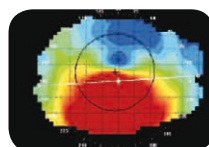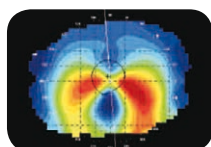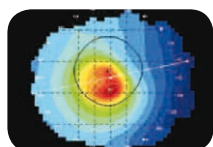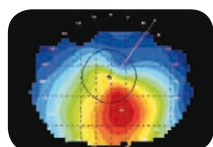

Design:

Rückfläche

- Zentral:
 - Große asphärische optische Zone - abhängig von der Basiskurve
 - Reverse Geometrie bei großem Durchmesser
- Peripher:
 - Variabler Edge Lift
 - Reverse Geometrie bei flacheren Basiskurven

Vorderfläche

- Asphärische optische Zone, zur Korrektur der sphärischen Aberration

Anpassung und Tipps:

Nutzen Sie **easyfit** zur Auswahl der ersten Testlinse aus dem Anpasssatz

Ektasie	Basiskurve
nicht klar zu identifizieren	HH-Mittelwert -0,20 mm
Keratokonius	siehe Anpasser-Guide
PMD und Keratoglobus	HH-Mittelwert -0,60 mm
nach chirurgischen Eingriffen	HH-Mittelwert -0,70 mm

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)	Edge Lift
5,80 bis 8,40 in 0,05 mm Abstufung, durchmesserabhängig	+30,00 bis -30,00 in 0,25 dpt Abstufung	13,60 bis 15,60 in 0,10 mm Abstufung Standard 14,60	+3 / +1 / 0 / -0,5 / -1,3

Anpassoptionen:

1. Variabler Edge Lift | 2. Torische Peripherie (PT) | 3. Asymmetrische-Cornea-Technologie (ACT) | 4. Torisch: rück-, front-, bitorisch

Trial Sets

ROSE K2 KC

Basiskurve (mm)
5,10 bis 7,60

Wirkung (dpt)
Basiskurvenabhängig

Durchmesser (mm)
8,50 bis 9,20

Edge Lift
Standard (0)

ROSE K2 NC

Basiskurve (mm)
4,60 bis 7,40

Wirkung (dpt)
Basiskurvenabhängig

Durchmesser (mm)
8,10 bis 8,90

Edge Lift
Standard (0)

ROSE K2 IC

Basiskurve (mm)
6,50 bis 8,60

Wirkung (dpt)
Basiskurvenabhängig

Durchmesser (mm)
11,40

Edge Lift
Standard (0)

ROSE K2 PG

Basiskurve (mm)
6,00 bis 9,00

Wirkung (dpt)
Basiskurvenabhängig

Durchmesser (mm)
10,40

Edge Lift
Standard (0)

ROSE K2 XL

Basiskurve (mm)
6,00 bis 8,00

Wirkung (dpt)
Basiskurvenabhängig

Durchmesser (mm)
14,60

Edge Lift
Standard (0)

MeniLAB 0,5%

Die ideale Pflege für alle ROSE K2 Anpass-Kontaktlinsen*



* Viruzide Wirksamkeit (gemäß DVV-RKI Leitlinie, August 2008), mikrobiologische Wirksamkeit (ISO 14729), Quelle: Menicon Data on file

Z Alpha E-1 Art.-Nr. 1255

EX E-1 Art.-Nr. 1231

Material:

- Z**
- Dk: 163
 - UV Filter
 - Handlingstint: eisblau

- EX**
- Dk: 64
 - Handlingstint: eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate


Pflegeempfehlung:

MENICARE PURE + PROGENT
+ SPRAY & CLEAN



Einsatzgebiet:

- Bei großem ausgedehntem Konus

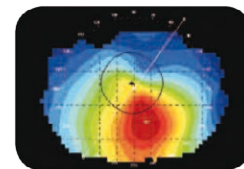

Design:

Rückfläche

- Zentral sphärische optische Zone
- Mehrkurvige, stark abflachende Peripherie

Vorderfläche

- Große sphärische optische Zone

Anpassung und Tipps:

HH-Radien	Basiskurve
Gute Messbarkeit der Hornhautradien	Flacher HH-Radius +0,10 mm bis +0,30 mm
Schlechte Messbarkeit der Hornhautradien	Basiskurve 6,50 mm bis 6,20 mm

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
5,00 bis 5,45		8,40
5,50 bis 5,95		8,60
6,00 bis 7,40		8,80
in 0,05 mm Abstufung	plan bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	



Individuell soft

3-Monatslinsen

6-Monatslinsen

Jahreslinsen

Individuell soft

3-Monatslinsen (Silikon-Hydrogel)

Indivisual	73
Indivisual Toric	74
Indivisual Progressive 2	75
Indivisual Toric Progressive 2	75

6-Monatslinsen (Hydrogel)

Indivisual72	76
Indivisual72 Toric	77
Indivisual72 Progressive 2	78
Indivisual72 Toric Progressive 2	78

Jahreslinsen (Hydrogel)

Soft 72	79
---------------	----

Individual

Silikon-Hydrogel

Material:

- Silikon-Hydrogel (Filcon V 3)
- DK 60 mmHg
- Wassergehalt 74%
(nicht-ionisch, FDA Gruppe II)
- Handlingstint: blau
- UV Filter

Pflegeempfehlung:

BIOcare All-in-One-Lösung



Bitte kein Peroxid verwenden.

Eigenschaften:

- Asphärische Peripherie
- Großer Parameterbereich
- Exzellente Wasserbindung

Vorteile:


- ▶ Gleichbleibend dünne Randgestaltung
- ▶ Individuelle Anpassung für nahezu alle Augen und Fehlsichtigkeiten
- ▶ Geringe Ablagerungsneigung und hoher Tragekomfort

Lieferbereich:

	Individual	Abstufungen
Basiskurve	7,40 mm bis 9,50 mm	0,10 mm
Durchmesser	13,00 mm bis 15,00 mm	0,10 mm
Sphärische Versorgung	-25,00 dpt bis +25,00 dpt	0,25 dpt
Multifokale Versorgung (Addition)	+1,00 dpt bis +3,00 dpt	0,50 dpt
Torische Versorgung (Cylinder)	-0,75 dpt bis -5,00 dpt	0,25 dpt
Torische-multifokale Versorgung (Cylinder)	-0,75 dpt bis -3,00 dpt	0,25 dpt
Achsen	0° bis 180°	1°

Lasermarkierungen:

Blick von außen auf die Linse

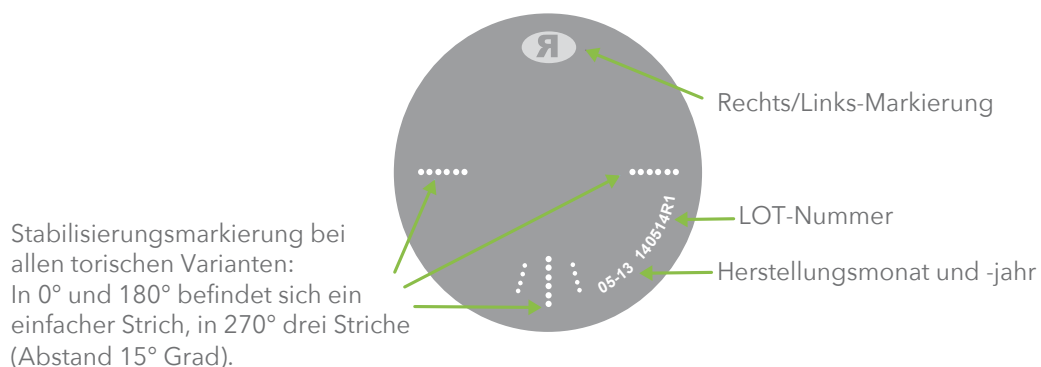

Individual Art.-Nr. 1341

Silikon-Hydrogel

Design:

Rückfläche

- Sphärisch optische Zone, asphärische Peripherie
- Komfortable dünne Randgestaltung

Anpassung und Tipps:

Sphärisch

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius Mittelwert +0,30 mm	HH-Durchmesser +2,20 mm


Individual Toric Art.-Nr. 1342

Silikon-Hydrogel

Design:

Torisch

- Dynamische Stabilisierung, asymmetrisch angeordnet

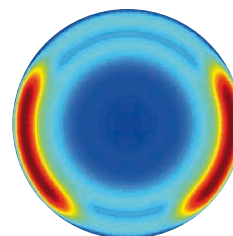

Anpassung und Tipps:

Torisch

Basiskurve (mm)	Durchmesser ist basiskurvenabhängig	
	Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius flach	≤ 7,70	13,90
	7,80 bis 8,20	14,20
	≥ 8,30	14,50

Indivisual Progressive 2 Art.-Nr. 1343

Indivisual Toric Progressive 2 Art.-Nr. 1344

Silikon-Hydrogel



Design:

Multifokal

- Simultansystem
- Zentrale Fernzone

Multifokal Torisch

- Dynamische Stabilisierung, asymmetrisch angeordnet

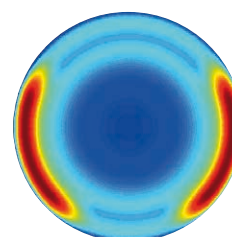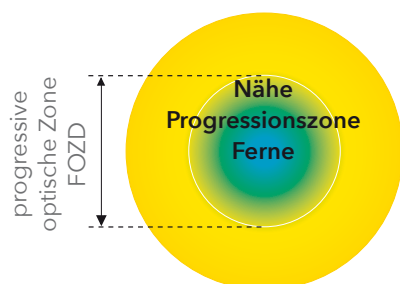

Anpassung und Tipps:

Multifokal

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius Mittelwert +0,30 mm	HH-Durchmesser +2,20 mm

Multifokal Torisch

Basiskurve (mm)	Durchmesser ist basiskurvenabhängig	
	Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius flach	$\leq 7,70$	13,90
	7,80 bis 8,20	14,20
	$\geq 8,30$	14,50

Individual72

Material:

- Hydrogel (mipafilcon A2)
- DK 34
- Wassergehalt 72% (nicht-ionisch, FDA Gruppe II)
- Handlingstint: aqua-green

Pflegeempfehlung:

BIOcare All-in-One-Lösung oder OXIcare Peroxidsystem



Eigenschaften:

- Asphärische Peripherie
- Großer Parameterbereich
- Exzellente Wasserbindung

Vorteile:


- ▶ Gleichbleibend dünne Randgestaltung
- ▶ Individuelle Anpassung für nahezu alle Augen und Fehlsichtigkeiten
- ▶ Geringe Ablagerungsneigung und hoher Tragekomfort

Lieferbereich:

	Individual 72	Abstufungen
Basiskurve	7,00 mm bis 9,50 mm	0,10 mm
Durchmesser	13,50 mm bis 15,50 mm	0,10 mm
Sphärische Versorgung	-25,00 dpt bis +25,00 dpt	0,25 dpt
Multifokale Versorgung (Addition)	+1,00 dpt bis +3,00 dpt	0,50 dpt
Torische Versorgung (Cylinder)	-0,75 dpt bis -3,00 dpt	0,25 dpt
Torische-multifokale Versorgung (Cylinder)	-0,75 dpt bis -3,00 dpt	0,25 dpt
Achsen	0° bis 180°	1°

Lasermarkierungen:

Blick von außen auf die Linse

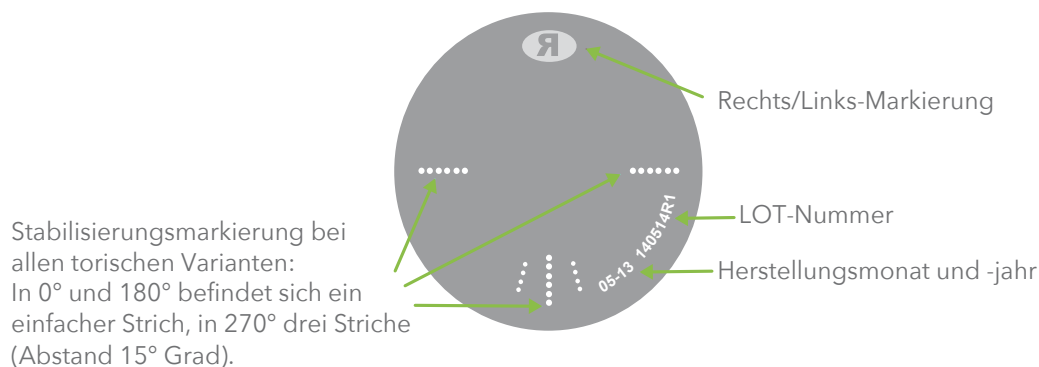

Indivisual72 Art.-Nr. 1301

Design:

Rückfläche

- Sphärisch optische Zone, asphärische Peripherie
- Komfortable dünne Randgestaltung

Anpassung und Tipps:


Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius flach +0,60 mm	HH-Durchmesser +2,40 mm

Indivisual72 Toric Art.-Nr. 1302

Design:

Torisch

- Prismatische Stabilisierung

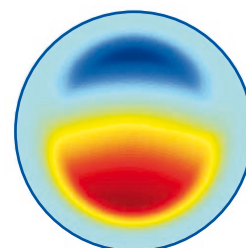

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius flach +0,60 mm	HH-Durchmesser +2,70 mm

Individual72 Progressive 2 Art.-Nr. 1303

Individual72 Toric Progressive 2 Art.-Nr. 1304



Design:

Multifokal

Simultansystem
Zentrale Fernzone

Multifokal Torisch

Prismatische Stabilisierung

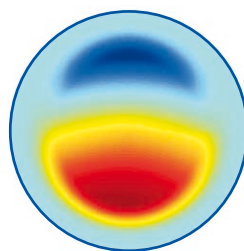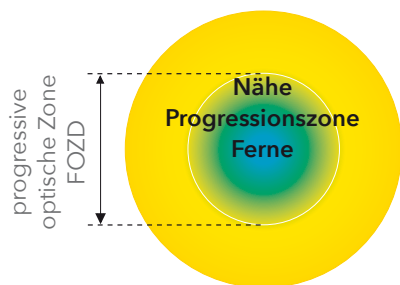

Anpassung und Tipps:

Multifokal

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius flach +0,60 mm	HH-Durchmesser +2,40 mm

Multifokal Torisch

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius flach +0,60 mm	HH-Durchmesser +2,70 mm

Soft 72

Art.-Nr. 1321

Weiche Jahreslinse

Material:

- Hydrogel (Mipafilcon A2)
- DK 34 mmHg
- Wassergehalt 72% (nicht-ionisch, FDA Gruppe II)
- Handlingstint: aqua-green

Pflegeempfehlung:

BIOcare All-in-One-Lösung
oder
OXIcare Peroxidsystem



Nutzungszeitraum:

12 Monate

Eigenschaften:


- Exzellente Wasserbindung

Vorteil:

- Geringe Ablagerungsneigung und hoher Tragekomfort

Design:

- Bi-sphärisch-asphärische Geometrie
- Sphärische optische Zone, asphärische Peripherie
- Komfortable dünne Randgestaltung

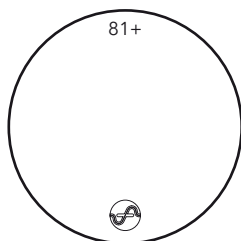

Markierung (von innen lesbar):
81 - 84 - 87 - 90 für die Basiskurve
+ = Durchmesser 14,0, kein + = Durchmesser 13,5

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Hornhautradien (mm)	7,20 7,30 7,40 7,50 7,60	7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20	8,30 8,40 8,50
Basiskurve (mm)	8,40	8,70	9,00

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
8,10 8,40 8,70 9,00	+25,00 bis -25,00 0,25 dpt Abstufung	13,50 14,00



Pflegemittel und Zubehör

Pflegemittel und Zubehör

Für weiche Kontaktlinsen

BIOcare - Multifunktionslösung	83
SOLOCARE AQUA® - Multifunktionslösung	84
MeniCare Soft - Multifunktionslösung	85

Für alle Kontaktlinsen

OXIcare - einstufige Peroxid-Lösung mit Platindisk	86
---	----

Für formstabile Kontaktlinsen

Das Menicon Pflgeteam	87
MENICARE PURE - Multifunktionslösung	88
PROGENT - Intensivreiniger	89
SPRAY & CLEAN - Lipidreiniger	90
MeniCare Plus - Multifunktionslösung	91
SP CARE - Reinigungs- und Aufbewahrungslösung	92
MeniLAB 0,5% - Viruzide Desinfektions- lösung für Anpasslinsen	93

Zubehör und Augentropfen

Zubehör	94
BLUpan® Augentropfen	95

BIOcare

Premium All in One Lösung mit natürlichen Inhaltsstoffen:
Extrakte aus Echinacea Stammzellen, GPI Molekülen und Hyaluronsäure

Premium Pflege mit
natürlichen Inhaltsstoffen

- Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren, Abspülen, Benetzen
- Entfernt Proteine
- Für alle weichen Kontaktlinsen

Packungsgrößen:

100 ml, Art.-Nr. 2510BIO

360 ml, Art.-Nr. 2511BIO

2 x 360 ml, Art.-Nr. 2512BIO

inklusive entsprechender Anzahl an Kontaktlinsenbehältern



Inhaltstoffe und Eigenschaften:

- Hohe antibakterielle Wirksamkeit, unterstützt durch den Extract der Echinacea angustifolia für eine hohe bakterizide und fungizide Wirkung (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens und Candida albicans)
- **4 Benetzungsstoffe:**
 - **Hyaluronsäure** – hilft, die Stabilität des Tränenfilms zu erhalten
 - **HEC (Zellulose)** – erhöht in wässriger Lösung die Viskosität
 - **Echinacea Stammzellen und GPI Cholin Moleküle (Extrakt aus Sonnenblumen Lezithin)** – spenden Feuchtigkeit, nähren und beruhigen, erhöhen die Widerstandsfähigkeit und die Regenerationskraft der Cornea

Vorteile:

- ▶ Natürlicher Schutz des Hornhautepithels bei gleichzeitiger maximaler antibakterieller Wirksamkeit
- ▶ Sichere Desinfektion
- ▶ Für optimalen Augenschutz und lang anhaltende Benetzung
- ▶ Hoher Komfort direkt beim Aufsetzen der Kontaktlinsen
- ▶ Optimale Verträglichkeit
- ▶ Unterstützt die Regeneration der Hornhaut

Für empfindliche Augen geeignet!

SOLOCARE AQUA®

Multifunktionslösung für alle weichen Kontaktlinsen

Der Klassiker

- Reinigen, Desinfizieren, Abspülen, Aufbewahren, Proteine entfernen
- Für alle weichen Kontaktlinsen

Packungsgrößen:

90 ml, Art.-Nr. 2600

360 ml, Art.-Nr. 2601

2 × 360 ml, Art.-Nr. 2602

4 × 360 ml, Art.-Nr. 2604

inklusive MicroBlock® antibakteriellem Kontaktlinsenbehälter (1 pro Flasche)



Inhaltstoffe und Eigenschaften:

- HydroLock® = ProVitamin B5 + Sorbitol
- MicroBlock® - antibakterieller Kontaktlinsenbehälter
- PHMB: effektive Desinfektion

Vorteile:

- ▶ ProVitamin B5 (Dexpanthenol) unterstützt die Regeneration der Hornhaut
- ▶ Sorbitol sorgt für exzellente Benetzung
- ▶ Zusätzliche Sicherheit vor mikrobieller Verschmutzung
- ▶ Schnelle und sichere Desinfektion in nur 5 Minuten

5-Minuten-Option!
Optimal für die Erfrischung der Kontaktlinsen zwischendurch.

MeniCare Soft

Multifunktionslösung für alle weichen Kontaktlinsen

- Reinigen, Desinfizieren, Abspülen, Aufbewahren, Proteine entfernen
- Für alle weichen Kontaktlinsen

Packungsgrößen:

360 ml, Art.-Nr. 2401

2 × 360 ml, Art.-Nr. 2402

Inklusive Kontaktlinsenbehälter (1 pro Flasche)



Inhaltstoffe und Eigenschaften:

- Glycin: Benetzer
- MACROGOL HCO-60: Reiniger
- Glykolsäure: Reiniger
- Propylen-Glycol: Benetzer
- PHMB: Konservierer

Vorteile:

- ▶ Unterstützt die Regeneration der Hornhaut
- ▶ Entfernt Lipide
- ▶ Reduziert Proteinablagerungen
- ▶ Benetzt die Kontaktlinse
- ▶ Effektive Desinfektion

OXIcare

Einstufiges Peroxid-System mit Platinkatalysator für alle Kontaktlinsen

Frei von
Konservierungsmitteln

- 3%ige Wasserstoffperoxid-Lösung zum Reinigen, Desinfizieren, Neutralisieren und Aufbewahren aller Kontaktlinsen
- Entfernt Proteine
- Für alle Kontaktlinsen (weiche und formstabile)

Packungsgrößen:

100 ml, Art.Nr. 2500OXI

360 ml, Art.Nr. 2501OXI

inklusive Kontaktlinsenbehälter mit Platinkatalysator



Inhaltstoffe und Eigenschaften:

- 3%iges Wasserstoffperoxid: kraftvolle Reinigung und hohe Desinfektionswirkung. Löst Ablagerungen und Verunreinigungen und unterstützt die Proteinentfernung
- Nach der Neutralisation frei von Konservierungsmitteln
- Praktischer Behälter mit integrierter Platindisc

Vorteile:

- ▶ Sichere Desinfektion
- ▶ Saubere Linsen mit hohem Tragekomfort.
- ▶ Hohe Verträglichkeit auch bei empfindlichen Augen
- ▶ Sehr einfache Anwendung: kein Reiben und Abspülen

Geeignet für weiche und
formstabile Kontaktlinsen.
Ideal für Silikon-Hydrogel-Linsen.

Das Menicon Pflegeteam

für alle formstabilen Kontaktlinsen



MENICARE PURE

Multifunktionslösung
– täglich

- Desinfektion, Reinigung, Abspülen, Aufbewahren
- Einfach und sicher in nur 30 Minuten
- Optimaler Tragekomfort durch hervorragende Benetzung

Packungsgrößen:

250 ml Flasche + Meni Case
Art.-Nr. 2220
70 ml Flasche + Meni Case
Art.-Nr. 2223



PROGENT

Intensivreinigung
– wöchentlich

- Zwei-Ampullen-System mit der intensiven Wirkung von aktivem Chlor
- Konzentrierte Intensivreinigung in nur 30 Minuten
- Darf nicht ans Auge gelangen

Packungsgrößen:

Packung mit je 5 Ampullen
A u. B
+ PROGENT Behälter
Art.-Nr. 2203



SPRAY & CLEAN

Lipidreiniger
– bei Bedarf täglich

- Konservierungsmittelfreier Reiniger
- Effektiv gegen Lipide und Öle
- Einfache Anwendung durch handliche Sprühflasche

Packungsgrößen:

Sprühflasche 15 ml
Art.-Nr. 2206

MENICARE PURE

Multifunktionslösung für alle formstabilen Kontaktlinsen
– besonders schonend

- Tägliche Reinigung und Aufbewahrung
- Für alle formstabilen Kontaktlinsen
- 1× wöchentlich Intensivreinigung mit PROGENT

Packungsgrößen:

Einsteigerset (70 ml + MeniCase), Art.-Nr. 2223

Einsteigerset (70 ml + MeniCase + PROGENT,
je 1 Ampulle A und B + 1 PROGENT Behälter), Art.-Nr. 2221
250 ml, Art.-Nr. 2220

**Besonders schonend durch Verwendung
von Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs**



Inhaltstoffe und Eigenschaften:

- ϵ -Polylysine: Konservierungsmittel auf natürlicher Basis
- Macrogolglycerol (HCO-60) = Oberflächenreiniger
- HPMC = Viskositätserhöher
- Vitamin C Glycosid – stabilisiert den Tränenfilm
- Hyaluronsäure = natürlicher Benetzer

Vorteile:

- ▶ Hohe Desinfektions- und Reinigungswirkung bei geringer Toxizität¹
- ▶ Entfernt zuverlässig Lipid- und Proteinablagerungen
- ▶ Hoher Komfort beim Aufsetzen der Linse
- ▶ Antioxidant, entzündungshemmend
- ▶ Benetzt die Augen und die Kontaktlinsen langanhaltend

Desinfektion nach 30 Minuten!

**Menicon Patent²: niedermolekulare Hyaluronsäure:
begünstigt Bindung an die Muzinschicht**

- ▶ bessere Benetzung, weniger Trockenheitsprobleme

Tipp:

Zur Erhöhung des Spontankomforts einen Tropfen MENICARE PURE auf die Kontaktlinse geben. Beim Comfort Design ist dies essenziell, da sich nur so das Tränenreservoir direkt füllt.

PROGENT

Intensivreiniger

- Wöchentliche Intensivreinigung
- Für alle formstabilen Kontaktlinsen

Packungsgrößen:

je 5 Ampullen A und B + 1 PROGENT Behälter,
Art.-Nr. 2203



Inhaltstoffe und Eigenschaften:


- Lösung A: Natriumhypochlorit
- Lösung B: Kaliumbromid

Vorteile:

- ▶ Sehr hohe und sichere Desinfektionsleistung
- ▶ Entfernt zuverlässig alle Verunreinigungen von der Kontaktlinsenoberfläche

Hervorragende Reinigungswirkung¹:

Bei wöchentlicher Anwendung, selbst gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen.

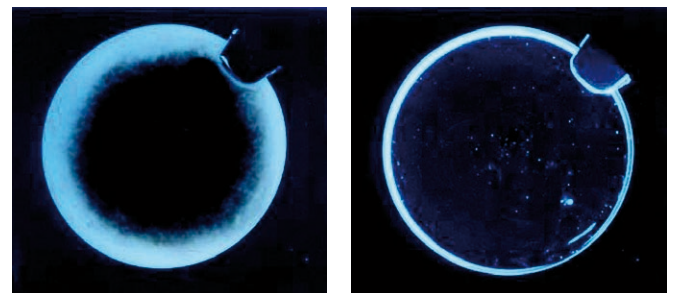

Kontaktlinsen **vor** und **nach**
der Reinigung mit PROGENT

Antimikrobielle Wirkung²:

Nach 30 Minuten Einwirkzeit sind alle nach ISO Standard relevanten Mikroorganismen abgetötet.

Sehr hohe Wirksamkeit gegen Acanthamoeben (Trophozoiten und Zysten) sowie gegen Prionen und folgende Viren: Polio type 1, HSV 1, Adeno type 5, Orthopox, Bovine Rota und Hepatitis B¹.

Reduktion Mikroorganismen

	Baseline	nach Anwendung PROGENT
Pseudomonas aeruginosa	$9,7 \times 10$	0
Staphylococcus aureus	5×10	0
Serratia marcescens	$7,6 \times 10$	0
Candida albicans	$7,3 \times 10$	0
Fusarium solani	$7,1 \times 10$	0

SPRAY & CLEAN

Lipidreiniger

- Konservierungsmittelfreier Reiniger
- Entfernt lipidhaltige Ablagerungen
- Für alle formstabilen Kontaktlinsen

Packungsgrößen:

Sprühflasche 15 ml, Art.-Nr. 2206

Effektiv gegen Lipide und Öle



Optimal für lipidhaltigen
und öligen Tränenfilm

Inhaltstoffe und Eigenschaften:


- Sodium Olefine Sulfonate (anionische Tensid): Reiniger
- Polyoxyethylene Alkyl Ether (nichtionisches Tensid) : Reiniger
- ETDA: Chelatbildner

Vorteile:

- ▶ Entfernt effektiv Lipid- und Öl- Ablagerungen von der Kontaktlinsenoberfläche
- ▶ Bessere Benetzung für langanhaltender Tragekomfort
- ▶ Klare Sicht

Hervorragende Reinigungswirkung¹:

Hartnäckige Lipid Ablagerungen werden mit nur einem Spraystoß und durch Reiben der Linse effektiv entfernt.

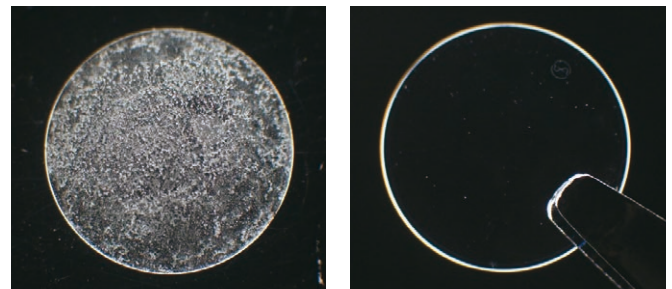

Kontaktlinsen **vor** und **nach**
der Reinigung mit SPRAY & CLEAN

Handliche Sprühflasche für gezielte
Dosierung und einfache Anwendung

MeniCare Plus

Multifunktionslösung für alle formstabile Kontaktlinsen

Bewährte Lösung

- Tägliche Reinigung und Aufbewahrung
- Für alle formstabilen Kontaktlinsen
- 1x wöchentliche Intensivreinigung mit PROGENT

Packungsgrößen:
250 ml, Art.-Nr. 2202



Inhaltstoffe und Eigenschaften:

- PHMB: Konservierer
- Hypromellose: Viskositätserhöher

Vorteile:

- ▶ Sehr sichere Desinfektion nach 5 Minuten
- ▶ Lagerung der Linsen bis zu 30 Tage möglich
- ▶ Benetzt und erhöht den Tragekomfort

Desinfektion nach 5 Minuten!

Antimikrobielle Wirkung¹:

Die antimikrobielle Wirkung von MeniCare Plus übertrifft bei weitem die Anforderungen der ISO 14729 – sowohl im Stand Alone- als auch im Regimen-Test.

Wirksam gegen Acanthamoeben²:

MeniCare Plus zeigt eine hohe Wirksamkeit gegen Acanthamoeben (Zysten und Trophozoiten) innerhalb von 2 Stunden.

SP CARE

Reinigungs- und Aufbewahrungslösung für formstabile Kontaktlinsen

Stark gegen Lipide

- Tägliche Reinigung und Aufbewahrung
- Für alle formstabilen Kontaktlinsen

Packungsgrößen:

120 ml, Art.-Nr. 2201



Inhaltstoffe und Eigenschaften:

- Gantrez: Viskositätserhöher
- Alpha Olefinsulfonsäurenatriumsalz: Reiniger
- Polyalkylenglycolether: Reiniger
- EDTA: Chelatbildner
- Dantogard2000: Konservierer

Tipp:

SP CARE darf **nicht** ans Auge gelangen!
Empfehlen Sie eine zusätzliche Abspüllösung, z.B. MENICARE PURE.

MeniLAB 0,5%

Viruzide Desinfektionslösung für alle formstabilen Anpasskontaktlinsen

- Professionelle Pflege aller formstabilen Anpasskontaktlinsen

Packungsgrößen:
250 ml, Art.-Nr. 2215



**Ausschließlich
für Fachpersonal!**

Inhaltstoffe und Eigenschaften:


- Natriumhypochlorit

Vorteile:

- ▶ Wirkt innerhalb von 5 Minuten gegen Viren, Bakterien und Pilze.¹
- ▶ Wirkt gegenüber Amöben (Trophozoiten und Zysten) und Prionen.²

Viruzide Wirksamkeit¹:

Die Leitlinie der DVV und des RKI, August 2008, zur Prüfung von chemischen Desinfektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen Viren, wird erfüllt.

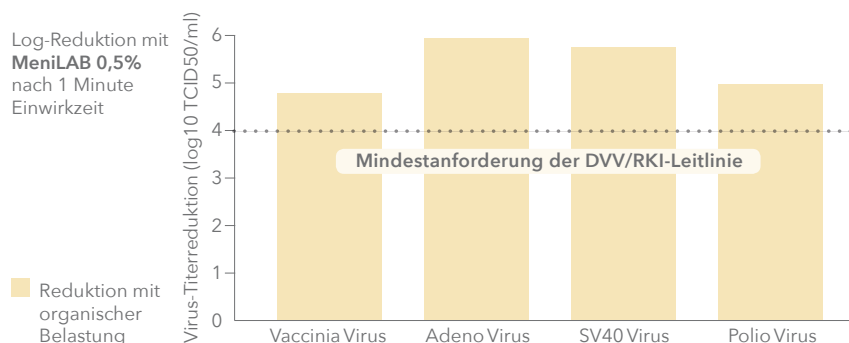

Antibakterielle Wirksamkeit³:

Die Log-Reduktion aller relevanten Mikroorganismen erfolgt nach vorgeschriebener Einwirkungszeit gemäß ISO 14729

Log Reduction MeniLAB

Mikroorganismen	Log-Reduktion nach Primär-Kriterien (Stand alone)	Log-Reduktion nach 2 Minuten
Pseudomonas aeruginosa	3	> 4,20
Staphylococcus aureus	3	> 4,08
Serratia marcescens	3	> 3,62
Candida albicans	1	> 4,00
Fusarium solani	1	> 3,65

Anwendung

- Nach Gebrauch die Kontaktlinse mit MENICARE PURE abspülen, manuell reinigen und in die Halterung des Originalbehälters geben.
- Linsenbehälter entleeren und bis zum Gewinde mit Meni-LAB 0,5% Lösung auffüllen
- Kontaktlinse einhängen, Behälter verschließen und die Anpasslinse 5 Minuten in der MeniLAB Lösung aufbewahren.
- Nach 5 Minuten den Behälter öffnen, Flüssigkeit wegschütten und die Kontaktlinse ca. 15 Sekunden mit MeniCare Pure abspülen.
- Behälter und Halterung ebenfalls gründlich mit MENICARE PURE spülen und anschließend mit MENICARE PURE befüllen.
- Die Kontaktlinse ist nun desinfiziert und kann in der frischen MENICARE PURE Lösung bis zur nächsten Verwendung aufbewahrt werden.

Quellen: 1. 2. 3. Menicon Data on file

Meni Case Art.-Nr. 2204

Aufbewahrungsbehälter
für formstabile Kontaktlinsen



Meni Cup Art.-Nr. 3121

Kunststoffsauger
für formstabile Kontaktlinsen



Meni Box Art.-Nr. 2205

Spiegeletui zur Aufbewahrung
formstabiler Kontaktlinsen



Meni Holder Art.-Nr. 3123

Kunststoffpinzette
für alle Kontaktlinsen



BLUpa[®]

Augentropfen



BLUpa[®] medical UD

BLUpa[®] medical OSD

BLUpa[®] medium OSD


Einheiten	Einzel-Dosis 20 × 0,50 ml	OSD-Multi-Dosierflasche 10 ml	OSD-Multi-Dosierflasche 10 ml
Einsatzbereich	Für starke Beschwerden / Trockenheitsproblematik		Für sehr starke bis chronische Beschwerden / Trockenheitsproblematik
Eigenschaften	0,15% Natriumhyaluronat PLUS 2% Dexpanthenol (Provitamin B5)		0,30% Natriumhyaluronat
	Stabile und länger anhaltende Befeuchtung auf der Hornhaut		Intensiver und anhaltender Schutzfilm durch hohe Viskosität
Besonderheit	Ohne Konservierungsmittel Ohne Phosphate Für alle Kontaktlinsenträger geeignet		

OSD = Ophthalmic Squeeze Dispenser – gewährleistet die Sterilität der Lösung während der Anwendung über die gesamte Laufzeit der Augentropfen.


Anwendung

3 - 5 × täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges geben

BLUpa[®] medical UD

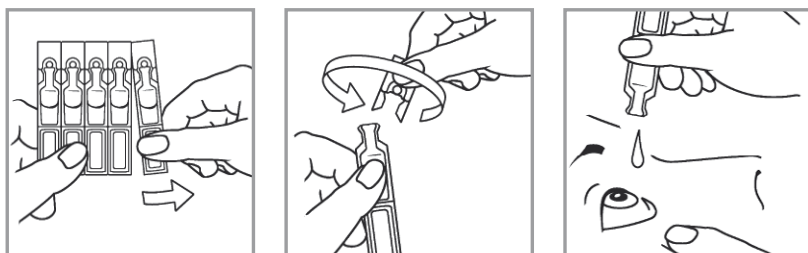

BLUpa[®] medical OSD und BLUpa[®] medium OSD

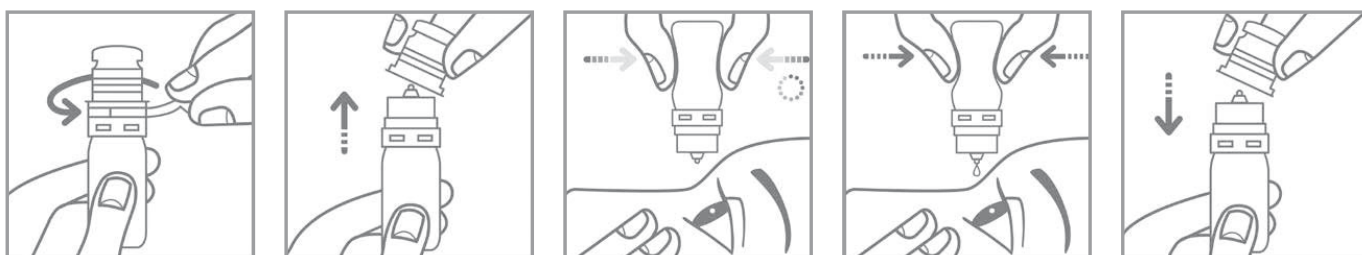

§ 1 Geltungsbereich

1. Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote der Menicon GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die mit Auftraggebern geschlossen werden.
2. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für die Rechtsnachfolger der Vertragsparteien.
3. Widersprechende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden hiermit ausdrücklich zurückgewiesen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn die Menicon GmbH den Abänderungen schriftlich zugestimmt hat.

§ 2 Angebote und Vertragsabschluss

1. Angebote der Menicon GmbH sind grundsätzlich hinsichtlich Preis, Menge, Lieferfrist, Liefermöglichkeit und Nebenleistungen freibleibend und unverbindlich. Insbesondere technische Abänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
2. Angebote werden erst nach einer schriftlichen Auftragsbestätigung der Menicon GmbH bindend.
3. Sofern die Auftragsbestätigung der Menicon GmbH Einzelheiten enthält, die von der Bestellung des Auftraggebers abweichen, gelten diese Abweichungen als von dem Auftraggeber genehmigt, sofern dieser den Abweichungen nicht innerhalb einer Woche seit Erhalt der Auftragsbestätigung schriftlich widerspricht. Die Menicon GmbH ist verpflichtet auf diese Rechtsfolge gesondert hinzuweisen

§ 3 Zahlungsbedingungen

1. Die Ansprüche der Menicon GmbH werden mit Erstellung der Rechnung fällig. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit zu begleichen. erfolgt die Zahlung des geschuldeten Betrages innerhalb von 8 Tagen ab dem Rechnungsdatum, gewährt die Menicon GmbH 1 % Skonto.
2. Bezahlte der Auftraggeber die geschuldete Summe nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung, tritt Verzug ein. In diesem Fall ist die Menicon GmbH berechtigt, Verzugszinsen nach § 288 BGB in Höhe von derzeit 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
3. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen und können jederzeit zurückgegeben werden. Die Aufrechnung ist nur mit von der Menicon GmbH anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig.
4. Jegliches Zurückbehaltungsrecht wegen bestrittener oder nicht rechtskräftig festgestellter Ansprüche, die nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlossen.

§ 4 Lieferfrist

1. Unvorhergesehene Ereignisse und Fälle höherer Gewalt (wie z. B. Betriebsstörung, Rohstoffmangel, Verkehrsstörung, behördliche Verfügung, Änderung der Währungsverhältnisse, Arbeitskämpfe etc.), sowie die Nichtbelieferung oder der Lieferungsverzug durch Vorlieferanten verlängern die Lieferfrist der Menicon GmbH um die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen.
2. Bei Lieferungsunmöglichkeit von Vorlieferanten ist die Menicon GmbH zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche wird auf § 7 verwiesen.

§ 5 Gefahrübergang und Gewährleistung

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Lager erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
2. Liegt ein von der Menicon GmbH zu vertretender Mangel vor, so ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
3. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, ist die Menicon GmbH zur Mangelbeseitigung nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus und hat die Menicon GmbH die Verzögerung zu vertreten, so kann der Auftraggeber nach seiner Wahl die Vergütung herabsetzen oder vom Vertrag zurücktreten.
4. Die Gewährleistungsrechte erlöschen, soweit Reparaturen oder Veränderungen vom Auftraggeber oder von dritter Seite am Liefergegenstand vorgenommen werden.
5. Mängel, die durch natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Bedienung oder unsachgemäßen Gebrauch bzw. außergewöhnliche Einsatzbedingungen entstehen, begründen keine Gewährleistungsansprüche.
6. Beanstandungen der Ware oder Leistungen der Menicon GmbH müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von acht Tagen nach Empfang, schriftlich vorgebracht werden. Nachweislich verborgene Mängel müssen sofort nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden. Werden Mängel nicht rechtzeitig angezeigt, gilt die Ware als durch den Auftraggeber genehmigt. Damit erlöschen alle Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers.
7. Die Abtretung von geltend gemachten Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen.

§ 6 Vertriebsbeschränkung

1. Der Auftraggeber verpflichtet sich gegenüber der Menicon GmbH, von der Menicon GmbH bezogene Produkte (Kontaktlinsen und Pflegemittel) nur dann über das Internet an Dritte zu vertreiben, wenn das schriftliche Einverständnis der Menicon GmbH vorliegt.
2. Im Falle eines Verstoßes gegen die vorstehende Verpflichtung wird die Menicon GmbH die Geschäftsbeziehung mit dem Auftraggeber unverzüglich beenden.

§ 7 Haftungsbeschränkung

1. Die Menicon GmbH haftet in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aufgrund einfacher Fahrlässigkeit der Menicon GmbH, insbesondere Ansprüche auf den Ersatz entgangenen Gewinns oder sonstiger Vermögensschaden, grundsätzlich ausgeschlossen. Dies betrifft nicht die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
2. Wird eine vertragswesentliche Pflicht fahrlässig verletzt, so ist die Haftung des Auftragnehmers auf den voraussehbaren Schaden begrenzt.

§ 8 Verjährungsfrist

1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechten wegen Mängeln, gleich aus welchem Rechtsgrund, beträgt 1 Jahr.
2. Dies gilt nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels.
3. Die Verjährungsfrist gilt nicht für Schadensersatzansprüche in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
4. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit Gefahrübergang.

§ 9 Eigentumsvorbehalt


1. Die Menicon GmbH behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zu seiner vollständigen Bezahlung sowie bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber vor.
2. Die Menicon GmbH räumt dem Auftraggeber die Befugnis zur Weiterveräußerung der Ware im ordentlichen Geschäftsgang ein. Diese Befugnis besteht nicht, wenn der Auftraggeber und der erwerbende Kunde den Ausschluss einer Abtretung der durch die Weiterveräußerung entstandenen Vergütungsansprüche vereinbaren wollen.
3. Für den Fall der Weiterveräußerung des Liefergegenstandes tritt der Auftraggeber der Menicon GmbH hiermit seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung der Liefergegenstände ab, ohne dass es einer weiteren Erklärung bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in der Höhe des Betrages, der dem von der Menicon GmbH in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der Menicon GmbH ist auf Verlangen eine schriftliche Abtretungsbestätigung auszuhandigen.
4. Unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs ist der Auftraggeber berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Das Widerrufsrecht kann die Menicon GmbH aus wichtigem Grund insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder begründeter Annahme für eine Überschuldung ausüben. Der Auftraggeber wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderungen unverzüglich an die Menicon GmbH weiterleiten.
5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Menicon GmbH auf Verlangen alle gewünschten Auskünfte zu den von der Abtretung betroffenen Ansprüchen zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhandigen.
6. Der Auftraggeber darf die im Eigentum der Menicon GmbH stehenden Gegenstände nicht verpfänden, zur Sicherung übereignen oder Dritten außerhalb des ordentlichen Geschäftsverkehrs überlassen. Er hat die Menicon GmbH von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Er trägt alle etwaigen Interventionskosten.
7. Bei einer Pflichtverletzung des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Menicon GmbH auch ohne Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen.

§ 10 Besonderes Rücktrittsrecht der Menicon GmbH

1. Treten nachträglich wesentliche Verschlechterungen der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers ein, die Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit begründen, ist die Menicon GmbH berechtigt, ihre Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten und dem Auftraggeber eine Frist von 2 Wochen für die Leistung von Vorauszahlungen oder die Stellung von Sicherheiten zu setzen.
2. Nach fruchtlosem Fristablauf ist die Menicon GmbH zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 11 Schlussbestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Das Gleiche gilt für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
2. Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Im Falle der Unwirksamkeit einer Klausel gelten die gesetzlichen Regelungen.
3. Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Menicon GmbH und dem Auftraggeber gilt deutsches Recht.
4. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der Menicon GmbH.

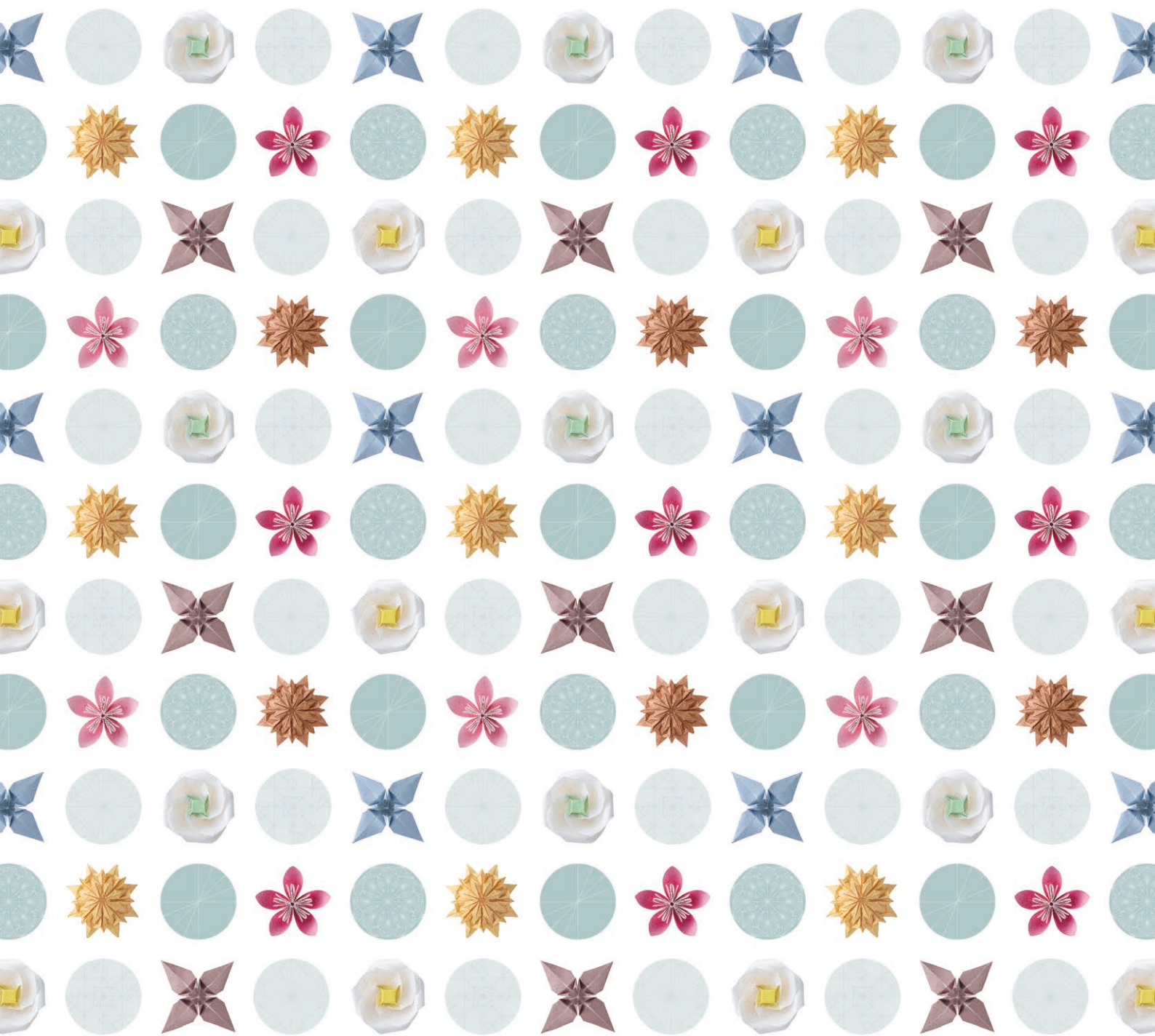

MS/4000/002